




de pour
les de
act



fresh

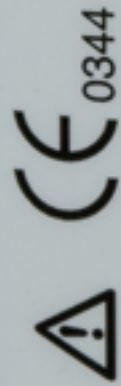

sterile A

ing: Polysorbaat 80
middel: PHMB 0,0002%
ing: Polysorbate 80
ing: PHMB 0,0002%

GEBRUIKSAANWIJZING
Eye Fresh is geschikt voor
reinigen, desinfecteren, bewaren
inzetten van in principe alle
zachte contactlenzen.

Was uw handen, spoel ze goed af met water en maak ze droog. Neem uw contactlenzen uit het oog en leg deze in uw lenshouder. Giet nu 5-10 druppels Eye Fresh op de lens en wrijf met uw vinger de lens voorzichtig schoon. Spoel de lens grondig af met Eye Fresh. Doe de lens vervolgens in de met Eye Fresh gevulde lenshouder. Dit is de optimale desinfectie- en bewaringstijd gedurende de nacht in de lenshouder. Na desinfectie kunt u de lens direct inzetten. Wanneer u de lens gedurende een langere periode niet gebruikt worden, dient u de lenshouder te bewaren.