


Wartungsarbeiten: Jede Lösung bedarf der DICIC MicroGag-Verpackung nicht direkt zu Hause geöffnet werden darf.

Verpackungsmaßnahmen: Lösung aus dem Kontaktlinsenbehälter nach jeder Verwendung unbedingt sorgfältig verschließen. Flasche gut verschließen (fallen, wenn Sie nicht in Verwendung ist. Nach Ablauf der Mindesthaltbarkeitsdauer (auf der Verpackung und der Flasche angegeben) nicht mehr verwenden. Entfernen Sie die Flasche und den Kontaktlinsenbehälter 30 Tage nach Anbruch bzw. nach 35 Verwendungen, je nachdem, was zuerst eintritt. Bei Raumtemperatur lagern. Verwenden Sie die Lösung immer bei Raumtemperatur. Bei beschädigtem oder fehlendem Schutzkappe/Flasche nicht verwenden. Benutzen Sie die Lösung nur mit dem dafür vorgesehenen Linsenbehälter. Drehen Sie den Behälter nicht um und schützen Sie ihn nicht, da dadurch Reste von nicht neutralisiertem Peroxid auf dem Deckel bleiben könnten. **FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFSCHNITTSTELLE**

Inhalt: 2x 300 ml, 2x spezieller Linsenbehälter zur Neutralisation, Packungsbeilage.

Wie gewöhnlich...
Wartungsarbeiten...
Verpackungsmaßnahmen...

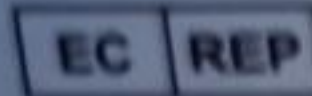


Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Irland

Vertrieb:
Barnaux Healthcare B.V.
Vluchtoord 38
NL-5406 XP Uden
REFQEY33669
05/2021




Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman St.
Rochester, NY 14609, USA

Made in Italy
Geproduceerd in Italië
Hergestellt in Italien
Fabriqué en Italie
Prodotto in Italia
Wyprodukowano we Włoszech

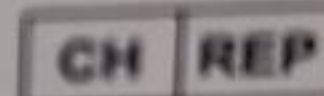

Bausch & Lomb Swiss AG
Industriestrasse 15A
6301 Zug, Switzerland

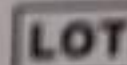

See base of box / Zie onderzijde van de doos / Siehe Unterseite der Schachtel / Voir le fond de la boîte / Vedere il fondo della confezione / Patrz podstawę pudełka

