

# Dementieklok Handleiding

- Digitale klok en fotoframe
- Wit en zwart beschikbaar
- Weergave van de dag, datum en tijd
- Handmatig instellen
- 8 Beschikbare talen
- 3 maal per dag pilherinnering
- 5 alarminstellingen
- Handmatige helderheid van dag en nacht
- Hoge kwaliteit



## Introductie van het product

Dit apparaat is gemakkelijk te gebruiken. De klok kan aangesloten worden op het lichtnet. Alle functies kunnen handmatig ingesteld worden. Het apparaat verandert in een digitale fotolijst wanneer de USB erin gestoken wordt. Druk op het "menu" om de instellingen te veranderen. Via de instellingen kun je het interface veranderen naar het originele.

## Digitale klokinterface

Toon de dag, datum, tijdsperiode en tijd.



### **Het interface instellen**

Druk op de knop “menu” aan de achterkant om de instellingen te wijzigen. Gebruik de knoppen ‘omhoog’, ‘omlaag’, ‘rechts’ en ‘links’ aan de achterkant om de instellingen te wijzigen. ‘Enter’ om te bevestigen.

### **Tijd en datum instellen**

Druk op ‘enter’ wanneer het lettertype geel wordt. Gebruik ‘omhoog’, ‘omlaag’, ‘rechts’ en ‘links’ om de instellingen te wijzigen en druk op ‘enter’ om de instellingen op te slaan.

### **Datummodus**

2 datummodus; dd/mm/jj en mm/dd/jj

### **Tijdsmodus**

2 tijdsmodus; 12-uurs en 24-uurs

### **Talen**

8 talen beschikbaar: Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, **Nederlands** en Pools.

### **Tijdsperiode instellen**

Handmatige instellingen of 4-tijdsperiode instellingen (ochtend, middag, avond en nacht) zijn beschikbaar. 4-tijdsperiodes kunnen ingesteld worden als ochtend: 07.00 tot 12.00 (middag en avond mogen niet op dezelfde tijd ingesteld worden).

### **Helderheid**

Helderheidsbereik van 1 tot 15; 1 is donker en 15 is helder

### **Volume**

Volumebereik van 1 tot 15; 1 is zacht en 15 is luid

### **Afbeelding vertoning**

Duur van beeldvertoning kan als ingesteld worden op de volgende tijd: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 30s en 1 min.

### **Pilherinneringen**

3 pilherinneringen in te stellen. Ochtend medicatie, middag medicatie en avond medicatie

### **Alarm instellen**

5 alarmen in te stellen (alarm01 tot alarm05) met ‘uit/eenmalig/herhalen’. Elk alarm duurt 90s tot dat de knop wordt ingedrukt.

**Eenmalig:** sla het alarm alleen vandaag

**Herhaal:** sla het alarm elke dag

### **Instellingen opnieuw instellen**

Terug naar de fabrieks instellingen