

2 timer.
Kammarnord smärta. Kompresen
inuti (max + 80 °C) 1-2 min. eller
en handfull salt med vatten 1-2 min.
skydd mot frost- / brännskador
djuk eller lägrade mellan hud och
för utövers bruk. Förvaras öfr-

öinen kylma/lämpöpakkaus

oljapussilla

hennäs turvotusta ja lievittää kipua
varmossa. Sopii urheiluvammojen,
idustun ym kiputilojen hoitoon.
kaus, jääkaapissa tai pakastimessa
den turvin ajan.

Tulehdusettomien kiputilojen hoitoon.
nähän max + 80 °C vesihuhteessa 5 min
lyhytyksä kullhossa mikroaaltouunissa
1-2 min.

ettumien / palovammojen välttämiseksi
pidä asettaa paljalle iholle, vaan esim.
teen päälle tai pyyhkeen sisään. Vain
nynöön. Ei lasten ulottuville.

og
eller kyldekap i minst to timer for bruk.
Varm: Kan brukes ved ikke-betennelsesrelaterte
strimler. Kompresen skal varmes i vannbad (maks
+ 80 °C) 1-5 minutter eller i en skål med vann i
mikrobølgeovn i 1-2 min.

Advarsel: For å unngå frostskader / forbrenning skal
pakningen ikke plasseres direkte på huden. Plasser
tøyrennetten som medfølger, et håndkle eller lignende
mellom pakningen og huden. Kun til utvortes bruk.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Inngredninger: Aqua, Glycerin, Carbonem,
Sodium Hydroxid, Sodium Sulfate,
Cl Food Blue 5, Phosphoroxid,
Ethylhexylglycerin, Laurylamine
Dipropylendianamine

290 x 120 mm

0100001



Fystoline

Fystoline Oy
Kantokatu 2
33040 Tampere
Finland
www.fystoline.fi
Made in Finland



9 418029 900791