

# CARE PUSH I

Handleiding voor de  
P4C-Q3



## Inhoud handleiding P4C-Q3

Inhoud handleiding P4C-Q3.....	1
STAP 1 - OPLADEN VAN HET ALARM.....	6
STAP 2 – UW KPN ACCOUNT EN UW BELTEGOED .....	7
Stap 2.1 Opwaarderen.....	7
Stap 2.2 Toevoegen prepaid SIMkaart aan uw eigen KPN account .....	7
Stap 2.3 Wisselen van de SIMkaart.....	8
STAP 3 – VERWIJDEREN/PLAATSEN VAN DE SIMKAART .....	10
STAP 4. UIT- EN AANZETTEN.....	11
1 Uitleg van de knoppen.....	12
2 Uitleg van de led lichten .....	13
3. Functionaliteiten .....	14
3.1 SOS-alarm .....	14
3.2 Telefoongesprek starten.....	14
3.3 Lage accuspanning.....	14
STAP 5. CONFIGURATIE EN INSTALLATIE VIA SMS COMMANDO'S .....	15
5.1 SOS telefoonnummers aan het alarm toevoegen (B11) .....	15
5.2 Controleren opgeslagen telefoonnummers .....	15
5.3 Verwijderen opgeslagen telefoonnummer.....	16
5.4 Favoriete nummer opslaan.....	16
5.5 SOS nummer instellingen .....	16
5.6 Tijdzone instellen.....	17
5.7 Locatie opvragen .....	17
5.8 Wachtwoord veranderen .....	17
5.9 Instellen trilstand en belsignaal .....	18
5.10 Inkomende oproepen automatisch beantwoorden.....	18
5.11 SOS alarm beltijd .....	18
5.12 Volume .....	19
5.13 Ledlichten .....	19
5.14 Batterij informatie opvragen .....	19
5.15 Op afstand uitschakelen P4C-alarm.....	19
5.16 Valdetectie.....	20
5.17 Geo-fence alarm .....	21
5.18 Geen beweging alarm (Sta-Op alarm) .....	21
5.19 Controleren instellingen .....	21

5.20 Alarm opnieuw opstarten (soft reset) .....	22
5.21 Alarm terugzetten naar standaard instellingen (hard reset) .....	22
5.22 Verwijderen data .....	22
5.23 GPS/Wifi volgorde .....	22
6. VEELGESTELDE VRAGEN .....	23
7. Hoe de locatiebepaling werkt .....	25
8. Hoe de val- en kanteldetectie werkt.....	27
9. Batterij.....	29
10. Veiligheidsmaatregelen .....	30
Deze gebruikershandleiding .....	30
Disclaimer / © Push4Care .....	30



**PUSH4CARE**

Oude Antwerpsepostbaan 96  
4744 RG Bosschenhoofd

E-mail: [info@push4care.nl](mailto:info@push4care.nl)  
Website: [www.push4care.nl](http://www.push4care.nl)

Telefoon: +31 (0)85 401 54 33