

# iglove

---

VOOR HANDPIJN  
EN ARTRITIS

**Instructies voor gebruik**  
Aandachtig lezen voor gebruik

Geleidend kledingstuk voor gebruik met TensCare TENS- en EMS-units.

- Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt.
- Twee handschoenen, geleverd met adapterkabel.
- Geleverd met een verpakking van twee referentie-elektrodenpads (elektrodenpads van 50 x 90 mm).

TensCare heeft de specificatie van de iGlove gewijzigd om de prestaties te verbeteren:

- We hebben de stof veranderd in een hoger zilveragehalte voor een beter contact.
- We leveren nu twee handschoenen voor gebruik met elke hand.
- We leveren nu zelfklevende referentie-elektrodenpads, voor een betrouwbaardere stroomverdeling.

### **Voorzichtigheid**

Als het wordt gebruikt voor pijnbestrijding voor diabetische neuropathie of andere aandoeningen waarbij er een verminderde of geen zintuiglijke sensatie is, bestaat er een klein risico dat verminderd of ongelijkmatig elektrisch contact een geïrriteerde of beschadigde huid kan veroorzaken. Er moet voor worden gezorgd dat de huidconditie onder het kledingstuk regelmatig wordt gecontroleerd.

## **Gebruiksaanwijzing**

1. Zorg ervoor dat de stimulator is uitgeschakeld.
2. Steek één pinconnector (van één leadpaar) in de connector die is bevestigd aan de iGlove, en de andere (van hetzelfde leadpaar) in de connector op de elektrodenpad.
3. De handschoenen moeten licht vochtig worden gedragen om de stroomdoorstroming te verbeteren.
4. Breng het kledingstuk aan
5. Plaats de elektrodenpad op dezelfde ledemaat als de iGlove.
6. Was de iGlove indien nodig met de hand en droog plat op kamertemperatuur.



**TensCare Ltd.**

9 Blenheim Road, Epsom,  
Surrey, KT19 9BE, UK  
+44 (0)1372 723 434  
[www.tenscare.co.uk](http://www.tenscare.co.uk)

EC

REP

**Advena Ltd.**

Tower Business Centre,  
2nd Flr, Tower Street, Swatar,  
BKR 4013, Malta



REF

K-GLOVE / K-GLOVE-L

I-GLOVE-NL Rev 1.0 03/23

*TensCare™*