

## AANDACHTSPUNTEN

1. Lees grondig de gebruiksinstructies en handleiding van de nekstretcher voordat u deze gebruikt. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe u het apparaat correct en veilig kunt gebruiken.
2. Bewaar de warmteband op een koele, droge plaats, buiten bereik van direct zonlicht en vocht. Bewaar de warmteband niet opgerold of gevouwen om schade aan de interne bedrading te voorkomen.
3. Niet aanbevolen voor kinderen.
4. Gebruik de warmteband niet langer dan de aanbevolen duur, meestal niet langer dan 30 minuten per sessie, om oververhitting te voorkomen.
5. Zorg ervoor dat de band comfortabel zit en niet te strak wordt gedragen. Het mag de bloedcirculatie niet belemmeren.
6. Wegeveld is niet aansprakelijk voor schade aan of door de Care Deluxe Menstruatie Warmteband door verkeerd gebruik.
7. Als je ernstige pijn, ongemak of abnormale symptomen ervaart, raadpleeg dan een arts. De warmteband is bedoeld als aanvullende therapie en mag geen medische behandeling vervangen.

Vragen of opmerkingen over het product?

Neem contact op via:

[wegeveld@gmail.com](mailto:wegeveld@gmail.com)

CARE DELUXE




# MENSTRUATIE WARMTEBAND

## HANDLEIDING

## INSTRUCTIE HANDLEIDING

### KNOPPEN

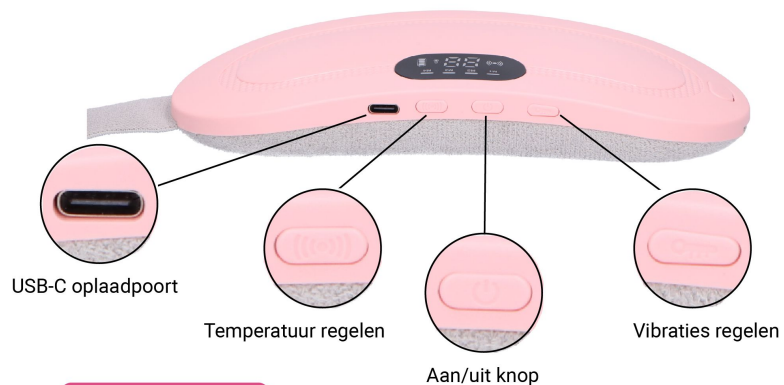


### GEBRUIK



- Je kan de Care Deluxe Menstruatie Warmteband ook direct op je huid gebruiken.
- Plaats de band over je onderbuik, waar je de menstruatiepijn voelt

### VIBRATIE MODI

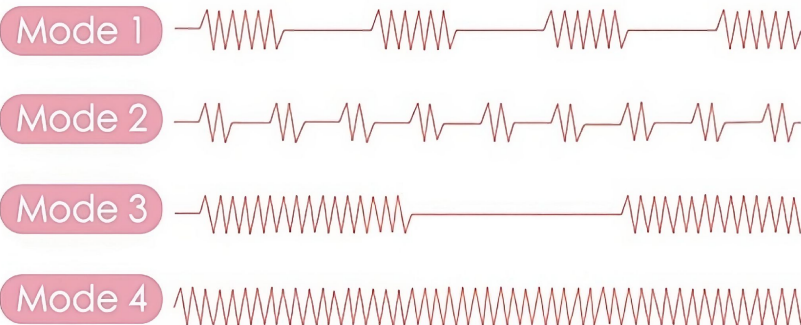

### GEBRUIKSSUGGESTIES

- Niet meer dan 30 minutes per sessie
- Gebruik de warmteband niet tijdens het slapen
- Als je ongemak, pijn of irritatie ervaart, verwijder de band dan onmiddellijk.