

PurelyGoods Mondtape

Bijsluiter — lees dit voor gebruik

Medisch hulpmiddel klasse I · CE · MDR (EU) 2017/745

Beoogd gebruik

Houdt de lippen tijdens de slaap zacht gesloten, zodat neusademhaling wordt ondersteund. Kan snurken en een droge mond door open-mondademhaling verminderen.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Was en droog de huid rond je lippen.
- 2 Verwijder één mondtape van de kaart.
- 3 Plak horizontaal over je lippen, ademgat in het midden.
- 4 Druk beide uiteinden 30 seconden stevig aan.
- 5 Verwijder de volgende ochtend voorzichtig.

Samenstelling

Non-woven bovenlaag op basis van rayon (viscose) · latexvrije acrylaatlijm · papieren bescherm laag (vóór gebruik verwijderd). Strookmaat 2,3 × 7,2 cm.

PFAS-vrij verklaard door de fabrikant (leveranciersverklaring, augustus 2024).

Niet gebruiken bij

- ✗ Slaapapneu of CPAP-gebruik
- ✗ Verstopte neus of verkoudheid
- ✗ Kinderen onder de 12 jaar
- ✗ Beschadigde of geïrriteerde huid

Waarschuwingen

- Gebruik alleen als je vrij door je neus kunt ademen.
- Verwijder direct bij benauwdheid, ongemak of huidirritatie.
- Niet combineren met alcohol of slaapmiddelen.
- Eenmalig gebruik — gooi na één nacht weg.

Bewaren

Koel, droog en buiten direct zonlicht. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum of bij beschadigde verpakking.

Symbolen op de verpakking

MD	NS	1X	EXP	MFR	LOT
Medisch hulpmiddel	Niet-steriel	Niet hergebruiken	Uiterste gebruiksdatum	Fabrikant	Batchcode

Voel je goed met PurelyGoods

Vragen over dit product? Neem contact op via purelygoods.nl

Fabrikant

Boeije & Boeije V.O.F. (PurelyGoods)
Industrieweg 14B, Nederland

Productgegevens

Catalogusnummer: MTS012
Versie 1.0 · NL

CE **MD** **1X**

purelygoods.nl