

DF Ear Cleaner - Oorsmeer Verwijderaar

Nederlandstalige Handleiding



Lees voor gebruik alle instructies zorgvuldig door

Let voor gebruik op de pijlen op de DF Ear Cleaner. Deze pijlen geven de richting aan waarin de hendel moet worden gedraaid. Het handvat moet absoluut niet in de tegenovergestelde richting of heen en weer worden gedraaid. Een verkeerd gebruik van de DF Ear Cleaner kan ernstig letsel veroorzaken.

1. REINIGEN VAN RECHTEROOR

- Verwijder de handgreep van de DF Ear Cleaner uit de verpakking.
- Steek de draaistaaf zorgvuldig en voorzichtig in het rechteroor. Forceer de draaistaaf niet te ver in de gehoorgang.
- Draai in de richting van de pijl op het handvat om het oorsmeer te verwijderen. Draai niet in de andere richting.
- Maak geen bewegingen tijdens het gebruik van de DF Ear Cleaner om letsel te voorkomen.

2. LOSKOPPELEN VAN DRAAISTAAF

- Druk op beide kanten van de draaistaaf en duw deze vervolgens naar voren totdat deze loskomt.
- Werp de draaistaaf na gebruik in een prullenbak of container. Absoluut niet door het toilet wegspoelen!

3. BEVESTIGEN VAN DRAAISTAAF

- Er zijn extra draaistaafjes meegeleverd bij de DF Ear Cleaner.
- Om de draaistaaf op het handvat te bevestigen, monteert u de opening van de draaistaaf met de groeven op het handvat.
- Druk vervolgens het handvat vervolgens stevig naar beneden om de draaistaaf aan het handvat te vergrendelen.

4. REINIGEN VAN RECHTEROOR

- Steek de draaistaaf zorgvuldig en voorzichtig in het rechteroor. Forceer de draaistaaf niet te ver in de gehoorgang.
 - Draai in de richting van de pijl op het handvat om het oorsmeer te verwijderen. Draai niet in de andere richting.
 - Maak geen bewegingen tijdens het gebruik van de DF Ear Cleaner om letsel te voorkomen.
 - Bewaar het handvat van de DF Ear Cleaner in het de plastic schermhoes wanneer het niet in gebruik is.
-

Waarschuwing!

- **Dit product mag niet worden gebruikt bij kinderen onder de 12 jaar.**
- **Dit product mag niet worden gebruikt bij personen met oorbuizen.**
- **Niet gebruiken bij pijn, ongemak, gehoorverlies, druk of bloeding.**

Prik of duw de DF Ear Cleaner niet te diep in uw oor. Dit product is niet bedoeld voor het inbrengen van diepe gehoorgangen. Oorsmeer wordt geproduceerd nabij de ingang van de gehoorgang, bekend als de 'buitenste gehoorgang'.