

2 timer.
Kammarnack smärta. Kompressen
innehåller max + 80 gr C i 5 min. eller
en handfull skål med vatten i 1-2 min.
spridd mot frost- / brännskador
eller tyrt eller lägrade mellan hud och
för utbryts bruk. Förvaras öfr-

öinen kylma/lämpöpackaus

oljapussilla

tertiä turvotusta ja lievittää kipua
varmossa. Sopii urheiluvammojen,
dusten ym kiputilojen hoitoon.
kaus, jääkaapissa tai pakastimessa
den turvin ajan.

Tulehdusettomien kiputilojen hoitoon.
nähän max + 80 °C vesihäuteessä 5 min
lyhytyssä kullossa mikroaaltouunissa
1-2 min.

eräminen / palovammojen välttämiseksi
pidä asettaa paljalle iholle, vaan esim.
teen päälle tai pyyhkeen sisään. Vain
nsoon. Ei lasten ulottuville.

og

eller kyldekap i minst to timer for bruk.
Varmt: Kan brukes ved ikke-betennelsesrelaterte
strimler. Kompressen skal varmes i vannbad (maks
+ 80 °C) i 5 minutter eller i en skål med vann i
mikrobølgeovn i 1-2 min.

Advarsel: For å unngå frostskader / forbrenning skal
pakningen ikke plasseres direkte på huden. Plasser
tøyrennet som medfølger, et håndkle eller lignende
mellom pakningen og huden. Kun til uterfor bruk.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Inngredninger: Aqua, Glycerin, Carbonei,
Sodium Hydroxid, Sodium Sulfate,
C Food Blue 5, Menthylol, Ethylhexylglycerin, Laurenylmire,
Dipropyleneandamine

290 x 120 mm
0100001



Fystoline

Fystoline Oy
Kantokatu 2
33500 Tampere
Finland
www.fystoline.fi
Made in Finland



9 418029 900791