

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

We (manufacturer or authorized representative):

Sunmul Trade B.V.
Brooshoofstraat 40
3371HS Hardinxveld-Giessendam
South Holland, The Netherlands

declare under our sole responsibility for the equipment

8720849992787
U Fit One Vingerspalk
Palm Strap Version



That the equipment is in conformity with the following relevant Union harmonization legislation and/or other normative documents and technical specifications:

[Regulation \(EU\) 2017/745](#) of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

Place and date of issue (of this DoC)

Hardinxveld-Giessendam, 15th May 2023

Signed by or for the manufacturer:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D.C. Heo-Vink', is written over a white background.

**D.C. Heo-Vink
Director**

HANDLEIDING U FIT ONE VINGERSPALK (PALM STRAP VERSIE)

Het gebruik van een vingerspalk.

Een vingerspalk wordt gebruikt als hulpmiddel, die de vinger beperkt bij pijn in beweging. Doordat de spalk om de vinger heen zit wordt de bewegingsvrijheid van de vinger beperkt. De vinger krijgt rust en blijft stabiel. In deze stabilisatie kan de vinger herstellen en de beperking in beweging zorgt voor pijnvermindering.

Disclaimer.

Voor het beste advies bij wat te doen bij uw klachten kunt u ten alle tijden het beste terecht bij een arts of fysiotherapeut. Zij kunnen deskundig advies geven over de pijnbestrijding en herstel van uw klachten. Het gebruik van onze producten zonder deskundig advies is op uw eigen risico.

Hoe te gebruiken.

Stap 1. Plaats de vingerspalk om de desbetreffende vinger, zorg hierbij dat de spalk aan de onderkant van de vinger zit om de bewegingsvrijheid te remmen.

Stap 2. Bind de straps om de vinger en bevestig deze met het klittenband aan de spalk.

Stap 3. Bind de lange strap rondom de handpalm voor extra bewegingsvermindering.

Let op! De spalk moet niet te strak zitten, maar wel stevig genoeg om de bewegingsvrijheid te remmen.



U-FIT^{ONE}

U Fit One Vingerspalk
8720849992787
One Size

Een vingerspalk wordt gebruikt als hulpmiddel, die de vinger beperkt bij pijn in beweging. Doordat de spalk om de vinger heen zit wordt de bewegingsvrijheid van de vinger beperkt. De vinger krijgt rust en blijft stabiel. In deze stabilisatie kan de vinger herstellen en de beperking in beweging zorgt voor pijnvermindering.

Waarschuwing!

Gebruikt u de vingerspalk voor medische redenen, overleg dan altijd eerst voor gebruik bij uw behandeld arts. Zij geven u advies over welke vorm handschoen het best geschikt is en over de nodige draagtijd.



Imported by
Sunmul Trade B.V.
Brooshoofstraat 40
3371HS Hardinxveld-Giessendam
South Holland, the Netherlands