




Jetez toute solution restant dans votre étui de trempage après la décontamination.
NE JAMAIS REUTILISER LA SOLUTION.

Contient : Citrate de sodium, chlorure de sodium, acide borique, sorbitol, aminométhylpropanol, EDTA disodique, deux agents hydratants (TETRONIC™ 1304† et HydraGlyde™ Matrice Hydratante [EOBO-41™ (polyoxyéthylène-polyoxybutylène)], conservateurs POLYQUAD™ (polyquaternium-1) à 0,001 % et ALDOX™ (myristamidopropyl diméthylamine) à 0,0006 %, et eau purifiée.



Acide borique

Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique). Ne pas changer la solution d'entretien de vos lentilles sans consulter votre spécialiste. Après ouverture du flacon, jetez toute solution restante après six mois.  6M
Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants.



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099
USA / États-Unis

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium / Belgique / Belgien



CH-REP: Alcon Switzerland SA,
Dammstr. 21, CH-6300 Zug

† TETRONIC™ is een handelsmerk van BASF.
† TETRONIC™ est une marque déposée de BASF.
† TETRONIC™ ist eine Marke der BASF.
† TETRONIC™ è un marchio di BASF.

300050264-0821