







Digitale Dementie klok Handleiding

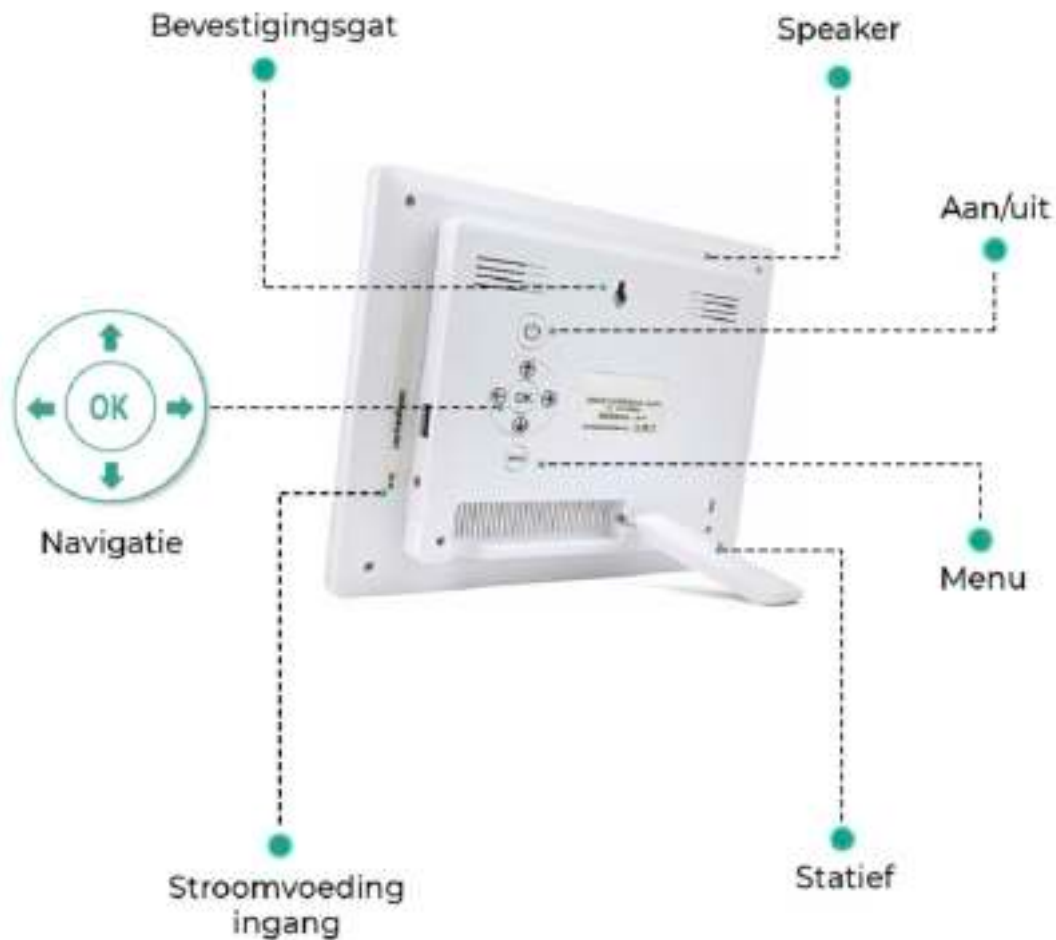

Bediening



- 1: Druk op de aan-knop om het scherm aan of uit te schakelen.
- 2:     gebruiken voor navigatie
- 3: Menu knop om naar de instellingen te gaan
4.  knop om de geselecteerde inhoud te bevestigen

Opmerking: houd de Menu knop gedurende 3 seconden in , de klok zal vervolgens automatisch overschakelen naar de zwart-witte klok interface.

Instellingen

1. Klok opstarten


Verbind de oplader met de klok. De tekst 'welkom' verschijnt vervolgens. Druk op de Menu knop op de achterkant van de klok of de Exit/set-up knop op de afstandsbediening om naar instellingen te gaan.




2. Alarm instellen

Je kunt in totaal vijf alarmen instellen, elk alarm kan op tijd en datum worden ingesteld.

Een alarm blijft zich herhalen als je hem op herhalen (repeat) zet. Anders zal het alarm alleen op de bepaalde dag en tijdstip afgaan.

3. Medicijnen herinnering instellen.

Klik op ochtend medicijn herinnering en druk op de  knop om te bevestigen.

Met   kunt u de gewenste tijd en datum(s) instellen. Druk vervolgens op  om te bevestigen.

Druk op de menu knop om terug naar de instellingen te gaan.

De hierboven genoemde stappen gelden hetzelfde voor de "middag medicatie herinnering" en "avond medicatie herinnering"

4. Tijd instellingen




Druk op de menu knop en selecteer "tijd instellingen".

Gebruik de   om de tijd in te stellen en bevestig dit met de  knop



Met een netwerkverbinding verbind de klok automatisch met de tijd van dat moment.

Zonder netwerk is de tijd op deze manier handmatig in te stellen.

5. Datum instellen



Druk op de menu knop en selecteer vervolgens “datum instellingen”
Gebruik de   op de klok om de juiste datum in te stellen. Wanneer u de juiste datum heeft ingesteld kunt u dit bevestigen met de  knop.

6. Tijdmodus instellen




Selecteer “tijdmodus instellen” zodra dit in gele letters toont kunt u de   pijlen gebruiken om de goede tijdmodus in te stellen.

24-uur tijdzone of 12-uur tijdzone.

7. Datum modus instellen

In het instellingen menu kunt u “datum modus” selecteren. Zodra dit in gele letters toont kunt u de   pijlen gebruiken om de goede datum modus in te stellen.

9. Selecteer taal

De standaard taal is Engels, de taal kan gewijzigd worden door er naar toe te navigeren via de pijlen. Wanneer het in gele letters toont kunt u de   gebruiken om de juiste taal in te stellen. Bevestig dit met de  knop.

Er zijn in totaal 7 talen beschikbaar:

- *Nederlands*
- *Engels*
- *Frans*
- *Duits*
- *Italiaans*
- *Zweeds*
- *Pools*

10. Automatisch dimmen

Er zijn 3 verschillende helderheid standen in te stellen:

- *Hoog*
- *Normaal*
- *Laag*

11. Volume instellen

Het volume kunt u instellen met de   op de klok te gebruiken.

Bevestig dit met de  knop.

1 is het laagst, 30 is het hoogst instelbare volume.