

Mission®

Cholesterol Monitor System 3-in-1

Snelle startgids

Eenvoudige instructies om snel van start te gaan

Distributie Benelux:
Testjezelf.nu BV
Hekkehorst 3 - 7207 BS Zutphen

ACON®
ACON Laboratories, Inc.
10125 Mesa Rim Road
San Diego, CA 92121, USA

EC REP
MDSB GmbH
Südflughafen 41
30175 Hannover, Germany

© 2013 ACON Laboratories, Inc. CE 0123



► Meter



Componenten:

- | | | |
|----------|---------------------|--------------------|
| 1. Meter | 2. 4 AAA batterijen | 3. Controle strips |
| 4. Etui | 5. Bijsluiters | 6. Garantiekarta |

► Cholesterol strips



1 Setup van de meter

A Installeren van de batterijen


Plaats 4 AAA batterijen (1.5V). De meter start automatisch op en toont datum en tijd setup scherm. Gebruik ◀ of ▶ om de setup af te maken. De meter schakelt dan vanzelf uit.



! Wees er zeker van dat u de juiste datum en tijd instelt, anders kunt u een E-6 fout code krijgen.


B Instellen van de meter

Selecteer via de Aan/Uit knop het "Set" scherm. Gebruik ◀ of ▶ om de meter in te stellen op 12 of 24 uur formaat. Druk op de Aan/Uit knop om de instelling op te slaan en door te gaan. Herhaal deze stappen bij het instellen van de datum en tijd, nummer van testen, geluid enzovoort.

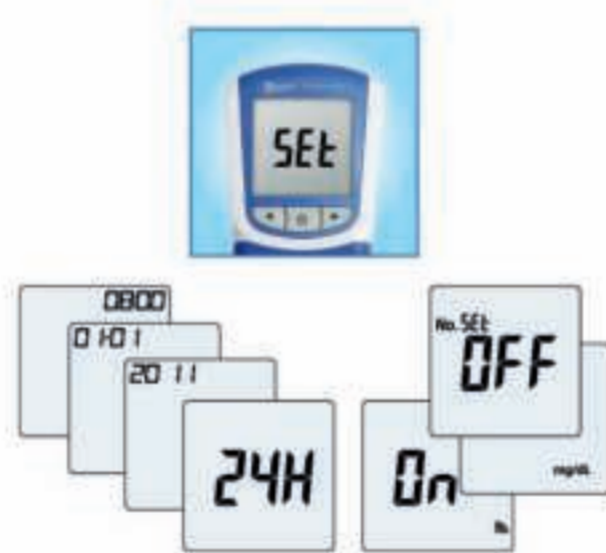

B Setup mode van de meter

Druk 4 seconden op de Aan/Uit knop terwijl de meter uitstaat. Gebruik ◀ of ▶ om in de display "No. Set", "CHE", "Set", "PC", "dEL" en "Eit" schermen te tonen. Druk op de Aan/Uit knop om de modus te selecteren.

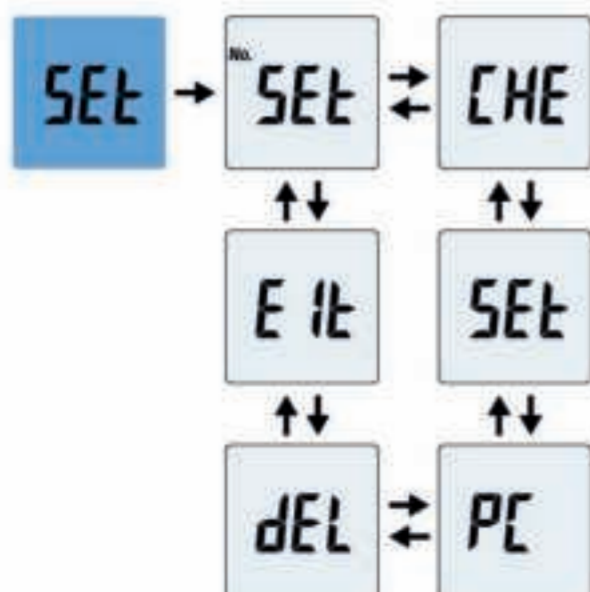

! Wees er zeker van dat u de juiste keuze maakt waarin u test! "BL" voor bloed uit de vingertop (consumenten gebruik), "SE" voor serum of plasma (alleen voor professioneel gebruik).

Opmerking: Raadpleeg de complete handleiding voor andere instelmogelijkheden.

D Setup afsluiten

Druk op de Aan/Uit knop om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het Setup scherm. Gebruik ◀ of ▶ totdat "Eit" verschijnt en druk op de Aan/Uit knop om de setup te verlaten.



2 Gereedmaken van de teststrip

A Plaatsen van de code chip

Plaats de meegeleverde code chip in de sleuf tot deze vastklikt.

Opmerking: plaats een nieuwe code chip welke geleverd wordt bij iedere verpakking met strips.



Wees er zeker van dat de code getoond op de display overeenkomt met de code op de verpakking van de strips.

B Een strip uitnemen

Haal 1 test uit de folie of uit het busje en sluit het busje direct weer.



C Strip plaatsen

Plaats de strip nadat het **strip symbol** op de meter knippert



Opmerking: Schuif de strip voorzichtig op zijn plek zonder deze te buigen.



Wees er zeker van dat de strip helemaal tot het einde van het test kanaal is geplaatst.

3 Verkrijgen van sample en handling

Bloed uit vingertop

Belangrijk:

Maak de prik plek goed schoon met alcohol of warm water en zeep. Warm water helpt de bloedtoevoer te verhogen. Droog daarna uw handen zeer goed.

A De vingerprik

Druk de prik pen of eenmalige lancet stevig tegen de vingertop. Prikken in de zijkant van de vingertop is minder pijnlijk.



B Verkrijgen van bloed


Veeg de eerste bloeddruppel altijd weg met een schone tissue om een zuivere meting te verrichten! Geef druk onderaan de vinger om een volle 2e druppel te verkrijgen.



C Het gebruik van het capillaire bloedbuisje

I. Inleiding

Een speciale luchtkamer in de capillair zorgt ervoor dat automatisch de juiste hoeveelheid bloed in het buisje wordt opgenomen.

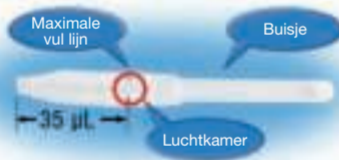

Opmerking: de verpakkingen met de 3-in-1 strips bevatten capillairen voor 35 µL. Individuele strips bevatten capillairen voor 10 µL. Haal deze beide nooit door elkaar en gebruik altijd de juiste capillair.


II. Verzamelen van bloed

Zonder in het capillair te drukken plaats deze met de tip in de bloeddruppel waarbij het capillair licht naar onderen is gericht aan de achterkant. Het bloed wordt automatisch opgezogen tot aan het zwarte vul lijntje.



Opmerking: Druk nooit op het capillair bij de afname van het bloed

Wees er zeker van dat het capillair is gevuld tot aan het zwarte streepje. Het is anders zeer lastig om het bloed uit het capillair te krijgen.

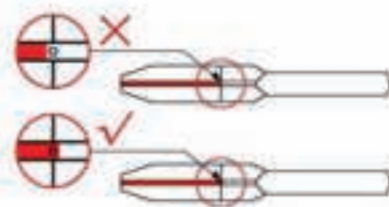

Opmerking: De capillair moet gevuld zijn tot aan het zwarte streepje. Bij onvoldoende bloed geef wederom druk onderaan de vinger en plaats de capillair nogmaals in de bloeddruppel. Leg eventueel het capillair op de rand van een tafel om een hand vrij te maken om druk te kunnen geven.


Venenbloed, Plasma of Serum

(Professioneel gebruik)

A Handling van het sample

Gehepariniseerd of EDTA venenbloed en/of serum en gehepariniseerd plasma kan worden gebruikt.

Opmerking: gebruik nooit EDTA plasma!

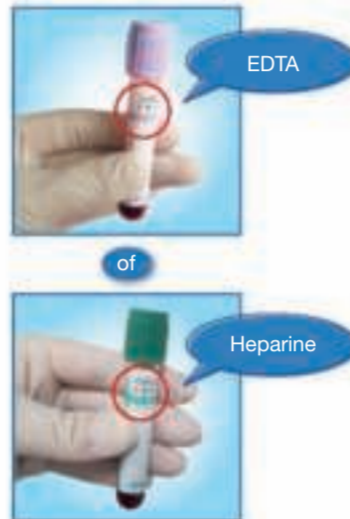

B Het mixen van de samples

Gebruik een schudmachine om de samples minimaal 15 minuten te schudden en voer de test daarna uit binnen 15 minuten.



Schud >15 minuten

C Verzamelen van het sample

Gebruik een pipet om 10 µL sample te verkrijgen bij een enkele bepaling (Totaal cholesterol, HDL of Triglyceride strips). Gebruik een pipet om 35 µL te verkrijgen bij een 3-in-1 strip.



! Wees er zeker van dat u de juiste hoeveelheid sample neemt voor de betreffende enkele (10 µL) of 3-in-1 bepaling (35 µL).



! Test alleen met verse bloedsamples binnen 8 uur na afname.



4 Toedienen bloed en aflezen resultaat

A Toedienen bloed aan strip

Wees er zeker van dat het bloeddruppel symbol knippert op de display van de meter. Gebruik 10 µL bij een enkele strip en 35 µL bij een 3-in-1 strip.

Opmerking: Let erop dat de juiste test is geselecteerd



! Waarschuwing: Gebruik alleen een capillair of pipet om het bloed aan te brengen op de strip.



! Waarschuwing: Dien nooit bloed toe aan de strip direct vanuit de vingertop!



B De meter is aan het testen



C Aflezen resultaat

Het resultaat wordt getoond tussen de 45 en 120 seconden. Druk op ◀ of ▶ om alle resultaten te zien bij een 3-in-1 strip (Totaal Cholesterol, HDL, Triglyceride, LDL en Ratio). De meter schakelt zichzelf uit na 5 minuten of druk op de Aan/Uit knop.



Opmerking: Deze snelle startgids vervangt niet de volledige handleiding welke ook is meegeleverd bij uw meter. Raadpleeg de volledige handleiding voor uitgebreide informatie over het gebruik van de meter en de strips. Daar leest u ook hoe u een cardiovasculair risico profiel kunt laten bepalen door de meter.

Meer informatie is ook te verkrijgen op: www.cholesterol-check.nl
Deze Mission 3-in-1 Cholesterolmeter wordt exclusief gedistribueerd in de Benelux door:

Testjezelf.nu BV T: 0575 574166 E: info@testjezelf.nu
Hekkehorst 3, 7207 BS Zutphen F: 0575 574199 W: www.testjezelf.nu

Number: 1150687901
Effective date: 2013-04-17