

## Gebruiksaanwijzing [condooms](#)

1. Haal het condoom voorzichtig uit de verpakking en pas op met scherpe nagels en voorwerpen.
2. Controleer of je de condoom kan uitrollen, knijp het topje voorzichtig dicht en plaats het condoom op de dop van de stijve penis.
3. Rol het condoom zo ver mogelijk af en controleer of het condoom juist is geplaatst.
4. Na de zaadlozing moet het condoom vlug worden verwijderd en kan het worden weggegooid in de vuilnisbak. ( Spoel een condoom niet door, dit kan verstoppingen veroorzaken)
5. Gebruik een condoom altijd maar eenmalig