

NL

Persoonlijke perineale sonde voor de behandeling van incontinentie middels elektrostimulatie en biofeedback (EMG en/of druk) voor professioneel en/of thuisgebruik.



Dit document aandachtig lezen vóór gebruik van de sonde!

Instructies voor het gebruik van PERIPROBE vaginale sondes

De sonde mag uitsluitend worden gebruikt met medische hulpmiddelen voor elektrotherapie (en/of biofeedback) met de volgende kenmerken:

- Symmetrische tweefasenimpulsen met een gemiddelde waarde van nul (zero DC);
- Maximale stroom 50 mA_{RMS} - Maximumspanning ± 80 V (160 Vpp);
- Maximale frequentie: 200Hz met een maximale impuls van 500µs.

De sonde is bestemd voor persoonlijk gebruik en mag **niet** gesteriliseerd worden. Door sterilisatie kan het medische hulpmiddel beschadigd raken. De eerste keer dat de sonde gebruikt wordt, moet het zakje waar deze in zit afgesloten zijn. De sonde zit in een **niet-steriele** verpakking, maar wordt ontsmet voordat ze verpakt wordt. Maak de sonde schoon met water, voordat ze voor het eerst gebruikt wordt, om eventuele resten van het ontsmettingsmiddel te verwijderen. Dompel de sonde **NIET** onder in vloeistof. Maak haar schoon met een doek bevochtigd met water en eventueel een neutrale zeep, ook na elk gebruik. Maak de sonde droog en berg haar in het hersluitbare zakje op. Houd de sonde buiten bereik van zwavel en andere zwavelhoudende stoffen, om te vermijden dat het aanzicht van de met goud beklede elektroden wordt aangetast. Sluit de sonde aan op het medische hulpmiddel voor de elektrotherapie en/of biofeedback en voer haar in de vagina in. Bevochtig de sonde met een kleine hoeveelheid water of gel op waterbasis als ze moeilijk ingevoerd kan worden of slecht elektrisch geleid. **Niet** gebruiken in combinatie met geneesmiddelen. Begin de behandeling volgens de aanwijzingen van de gebruikershandleiding van het medische hulpmiddel waar de sonde op is aangesloten.

Contra-indicaties: De sonde niet voor elektrostimulatie gebruiken onder de volgende aangetoonde of vermeende omstandigheden: blaasontsteking of anale/vaginale ontstekingen, colorectale of genito-urinaire kanker, zwangerschap of dragers van pacemakers (informeer bij de arts die de pacemaker voorgeschreven heeft), vesicoureterale reflux, hypotone blaas.

Opgelet! - De onderdelen van de sonde **NIET** laten draaien of demonteren. - De effecten van perineale stimulatie op de lange duur zijn nog niet vastgesteld. - De aanwijzingen van het medische, specialistische voorschrift nauwgezet naleven. - De sonde niet aansluiten op een elektrisch scalpel (gevaar voor brandwonden) - De sonde niet gebruiken als de elektroden beschadigd zijn.

Garantie - Dit product is een zogenaamd medisch verbruikshulpmiddel en is daarom onderhevig aan slijtage. Dit medisch hulpmiddel is getest om gebruikt te worden voor maximaal circa 60 behandelingen (max. 1 uur/behandeling). Dit product heeft een garantie van maximaal 6 maanden vanaf de aankoopdatum. De werking voor een beperkt gebruik van ongeveer 60 behandelingen wordt gewaarborgd. Om het product te laten controleren en/of vervangen en de garantie te activeren moet de consument het in de originele verpakking, zakje of doos met batchnummer terugsturen naar de verkoper of fabrikant met inbegrip van de eventueel aangekochte accessoires, onder vermelding van alle benodigde contactgegevens om over de stand van zaken ingelicht te kunnen worden.