



# FINLANDIC



**GEBRUIKSAANWIJZING STA OP FAUTEUIL**

<b>Algemene informatie</b> .....	<b>3</b>
<b>Veiligheidsinstructie en waarschuwingen</b> .....	<b>3</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>3</b>
<b>Bedienen van de stoel Sta-opstoel met 1 motor</b> .....	<b>4</b>
<i>Knop A – Relaxfunctie</i>	
<i>Knop B –Opstafunctie</i>	
<b>Bedienen van de stoel Sta-opstoel met 2 motoren</b> .....	<b>5</b>
<i>Knop A – Opstafunctie</i>	
<i>Knop B – Beensteun functie</i>	
<i>Knop C – Rugleuning naar achteren</i>	
<i>Knop D – Rugleuning naar voren</i>	

**Finlandic BV**

Coehoornstraat 11

5916PH Venlo, Nederland

Telefoon: +31 (0)6 - 40983220

Fax: [www.finlandic.nl](http://www.finlandic.nl)

## **Algemene informatie**

Deze sta-opstoel is geleverd door: Finlandic BV, Coehoornstraat 11, 5916PH Venlo Nederland.  
Telefoon: +31 (0)6 - 40983220, Fax, [www.finlandic.nl](http://www.finlandic.nl).

In deze gebruiksaanwijzing treft u belangrijke informatie aan omtrent het gebruik van uw sta-opstoel. Leest u deze gebruiksaanwijzing dus goed door, alvorens u de stoel gaat gebruiken.

## **Veiligheidsinstructie en waarschuwingen**

Volgt u de onderstaande waarschuwingen te allen tijde op:

- Deze sta-opstoel is voorzien van een krachtig motormechaniek. Kijk eerst of er niets beklemd kan raken tussen de bewegende delen van het mechaniek, voordat u de verstelmogelijkheden gaat gebruiken. Kijk vooral goed uit wanneer er kinderen of huisdieren in de buurt zijn.
- Plaats de stoel dusdanig in de kamer dat alle verstelmogelijkheden zonder enige obstructie kunnen worden gebruikt en het elektriciteits snoer geen valgevaar kan opleveren. Zet deze op een vlakke, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.
- De sta-opstoel is ontworpen om door 1 persoon in te zitten van maximaal 120 kilogram lichaamsgewicht. Het is niet de bedoeling op de beensteun te gaan zitten. Finlandic is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van de sta-opstoel.
- De beweging van de sta-opstoel kan worden beïnvloed door sterke electromagnetische velden (bijv. alarm systemen, mobiele telefoons, elektrische generatoren of krachtbronnen). Wanneer uw sta-opstoel onverwacht gedrag vertoont, trek de stekker uit het stopcontact en probeer de stralingsbron te achterhalen.
- Controleer bij storing altijd eerst of de stekker in het stopcontact zit. In alle andere gevallen adviseren wij u de stekker uit het stopcontact te verwijderen en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw leverancier


Finlandic is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik.

## **Garantie**

De garantie op uw sta-opstoel bedraagt 12 maanden op constructie, mechaniek, elektronica, bekleding en vulmaterialen.

Om een beroep te doen op garantie dient u uw klacht te melden door een email te sturen naar [info@finlandic.nl](mailto:info@finlandic.nl). Bij onjuist of onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie alsook wanneer er wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan de stoel door een partij die daartoe niet door Finlandic is geautoriseerd.

## Bedienen van de stoel Sta-opstoel met 1 motor

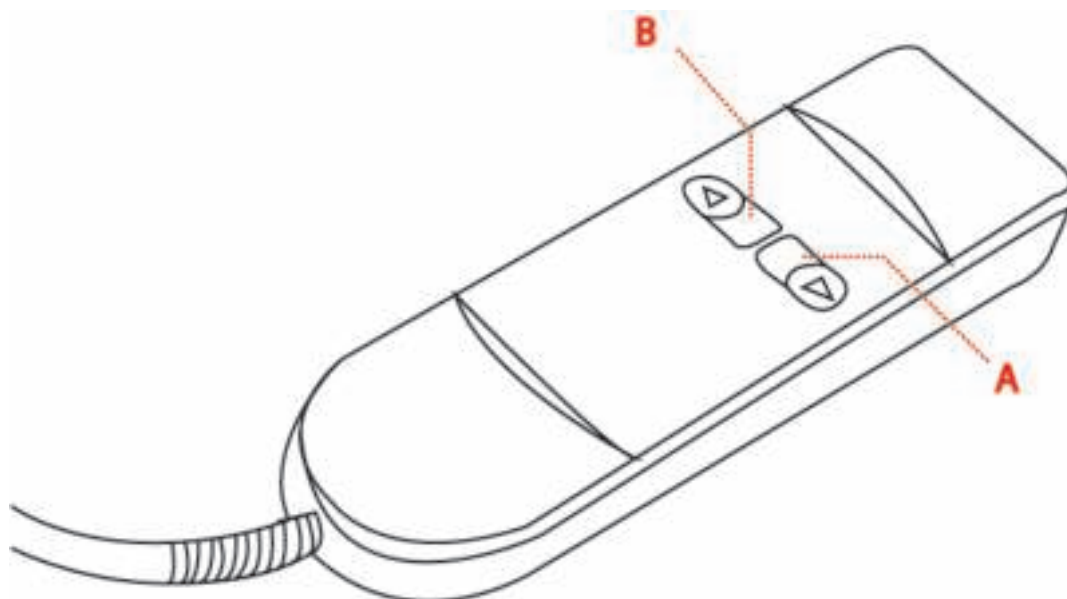

### **Knop A – Relaxfunctie**


Met de knop met pijltje naar rechts bedient u de relaxfunctie van de stoel. De beensteun komt uit en de rugleuning gaat naar achteren.

Ingeval de stoel in de sta-opstand staat, komt deze middels deze knop eerst terug naar de zitstand en daarna door naar de relaxstand.

### **Knop B –Opstafunctie**

Met de knop met het pijltje naar links, bedient u de sta-opfunctie van de stoel. De stoel gaat omhoog en kantelt licht naar voren, waardoor u gemakkelijk uit de stoel kunt stappen. Wanneer de stoel in relaxstand staat, gaat deze middels deze knop eerst terug naar de zitstand en daarna door naar de sta-opstand.

## Bedienen van de stoel Sta-opstoel met 2 motoren

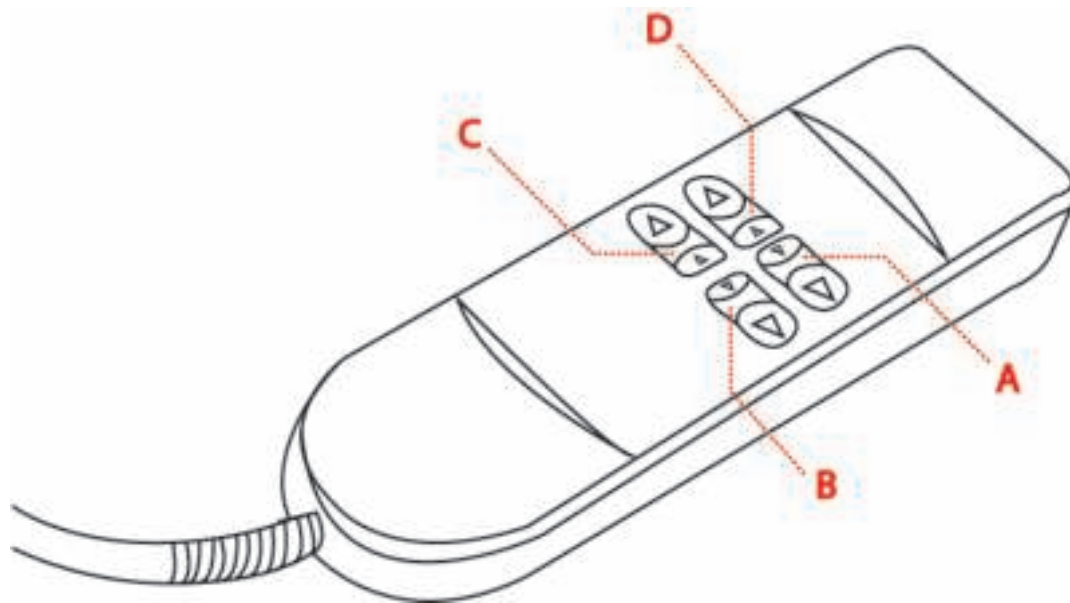

### **Knop A – Opstafunctie**

De knop met het pijltje rechtsboven naar boven is de sta-opfunctie. De stoel gaat omhoog en kantelt licht naar voren, waardoor u gemakkelijk uit de stoel kunt stappen. Indien de beensteun uitstaat, wordt deze eerst ingetrokken.

### **Knop B – Beensteun functie**

Met de knop met het pijltje naar onderen bedient u de beensteun. Wanneer de stoel nog in de sta-opstand staat komt deze eerst naar beneden. Daarna gaat de beensteun uit.

### **Knop C – Rugleuning naar achteren**

Hiermee verstelt u de rugleuning naar achteren.

### **Knop D – Rugleuning naar voren**

Hiermee verstelt u de rugleuning naar voren.

**Finlandic BV**  
Coehoornstraat 11  
5916PH Venlo, Nederland  
Telefoon: +31 (0)6 - 40983220  
Fax: [www.finlandic.nl](http://www.finlandic.nl)