

Az Arianna orrszívó használata:

Az A jelű szívófej zárja el teljesen az egyik oldali orrfejet. A szívás kb. néhány másodperc megszakításokkal történjék, amíg a váladék ürül. A szívófej az orrbemenetbe illesztve le-, fel- és oldalt is mozgatható. A szívás naponta többször megismételhető a nátha gyógyulásáig.

Az orrszívó mosása, antibakteriális, folyékony szappannal vagy mosogatószerrel.


További információért kattintson ide!

Az orrszívó fertőtlenítése

Az eszközök kifőzése.

Az orrszívó összeszerelése:

1. Az "A" jelű szívófejet bedugjuk a "B"-vel jelölt részbe.
2. Bekapcsoljuk a porszívót.
3. A porszívó gégecsővébe behelyezzük a "C"-vel jelölt részt.

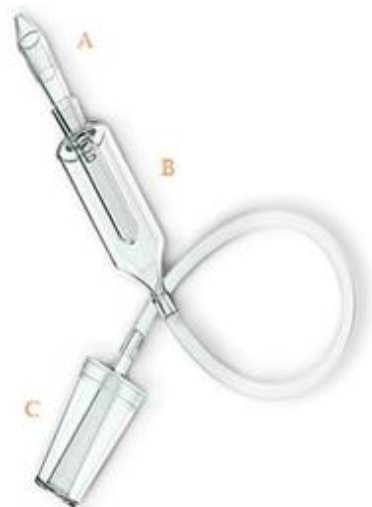

Az Arianna orrszívó szétszerelése:

A működő porszívóból kihúzzuk a "C"-vel jelölt alkatrészt, majd kikapcsoljuk a porszívót. A Orrszívó Porszívó dobozában 2 db A-jelű szívófejet talál.



Mindkét termékünk kapható a patikákban és a bababoltokban is!