

Tick 2 - Zeckenentferner

Wichtig: Zecken müssen so schnell wie möglich entdeckt und entfernt werden.

Gebrauchsanweisung:

1. Biegen Sie den Zeckenentferner an der Spitze in einem Winkel von ca. 30° bis 45°. (ähnlich einer Skispitze-s.Abb.)
2. Halten Sie den Zeckenentferner mit der großen Öffnung über die Zecke. Üben Sie dabei nur leichten Druck auf die Haut aus.
3. Ziehen Sie den Zeckenentferner gleichmäßig in Richtung Zecke, so dass die Zecke langsam in den keilförmigen Schlitz gleitet.
4. Ziehen Sie gleichmäßig weiter. Die Zecke wird am Kopf von dem keilförmigen Schlitz eingeklemmt und von der Haut entfernt.
Achtung! Nur Ziehen, nicht abheben! (s. Abb.)
5. Der Zeckenentferner ist mehrfach verwendbar. Er sollte nach Gebrauch gereinigt werden.

Die Entfernung der Zecken geschieht schnell und ohne vorherige Berührung. Dadurch hat die Zecke keine Gelegenheit, Stoffe in die Bißstelle abzugeben.

Beobachten Sie in den kommenden Tagen aufmerksam die betroffene Hautstelle nach Infektionssymptomen und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt bzw. Veterinär auf.

Erkrankungen die von Zecken verursacht werden:

1. **Borreliose** (spiralförmige Bakterien)
2. **FSME** (virale Erkrankung)
3. **Ehrliciose** (.....)
4. **Babesiose**
5. **Tularemie**
6. **Q-Fieber**

CE

