

2 timer.
Kammarnack smärta. Kompressen
inuti (max + 80 °C) 1-2 min. eller
en hand på med vatten 1-2 min.
skydd mot frost- / brännskador
eller ty utövers bruk. Förvaras öfr-

öinen kylma/Isoppålägg

örslappstilla
berettis turvotus ja lievittäs kipua
varmossa. Sopii urheiluvammojen,
idurusten ym kiputilojen hoitoon.
kaus, jääkaapissa tai pakastimessa
den turvin ajan.

Tulehdusettomien kiputilojen hoitoon.
nterään max + 80 °C vesihäutussa 5 min
lyhytyssä kullhossa mikroaaltouunissa
1-2 min.

ettumien / palovammojen välttämiseksi
pää asettaa paljalle iholle, vaan esim.
teen päälle tai pyyhkeen sisään. Vain
ynöön. Ei lasten ulottuville.

og ...

eller kyldekap i minst to timer for bruk.
Varm: Kan brukes ved ikke-betennelsesrelaterte
strimler. Kompressen skal varmes i vannbad (maks
+ 80 °C) 1-2 minutter eller i en skål med vann i
mikrobølgeovn i 1-2 min.

Advarsel: For å unngå frostskader / forbrenning skal
pakningen ikke plasseres direkte på huden. Plasser
tøyrennet som medfølger, et håndkle eller lignende
mellom pakningen og huden. Kun til uterørs bruk.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ingredienser: Aqua, Glycerin, Carbonei,
Sodium Hydroxid, Sodium Sulfate,
Cl Food Blue 5, Phosphoroxid,
Ethylhexylglycerin, Laurylamine
Dipropylendianamine

290 x 120 mm
0100001



Fystoline

Fystoline Oy
Kantokatu 2
33000 Tampere
Finland
www.fystoline.fi
Made in Finland



9 418029 900791