



Handleiding
Monviso

**LANGDURIG ZITTEN ZONDER
KLACHTEN**



Gefeliciteerd met je aankoop!

Bedankt dat je hebt gekozen voor het Zitkussen Monviso van Best Life. Ons doel is om jouw zitcomfort te verbeteren en ervoor te zorgen dat je zonder pijn langdurig kunt zitten, waar je ook bent.

3**Introductie****4****Specificaties****6****Verpakking****7****Garantie / Contact**

Voordat we beginnen

Het zitkussen kan in het begin anders aanvoelen dan je gewend bent. Dit is normaal! Je lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de juiste ondersteuning. **Geef jezelf minimaal 14 dagen om eraan te wennen – 95% van onze klanten ervaart daarna merkbaar meer comfort en minder druk op het stuitje, de heupen en de onderrug.** Mocht het wennen zijn, probeer het kussen dan afwisselend te gebruiken. Je hebt 30 dagen om het zorgeloos te testen.

Ultiem comfort

De ergonomische ringvorm van het Monviso ringkussen verlicht druk op gevoelige plekken en verdeelt je gewicht gelijkmatig. Dit helpt pijn in stuitje, onderrug en bekken te verminderen. Dankzij de optimale dikte zit je langdurig comfortabel, thuis, op het werk of onderweg.

Waarom een zitkussen?

De ergonomische ringvorm van het Monviso ringkussen vermindert druk op gevoelige plekken en zorgt voor een evenwichtige gewichtsverdeling. Dit helpt pijn en spanning in je stuitje, onderrug en bekken te verlichten. Dankzij de optimale dikte biedt het kussen langdurig comfort, of je nu thuis, op het werk, in de auto of tijdens het reizen zit.

Gebruik zitkussen

Plaats het Monviso zitkussen met het logo van de stoel af, zodat het Best Life logo zichtbaar is tussen je benen wanneer je erop zit. Zo ervaar je de optimale ondersteuning en drukverlichting van het kussen.



Hoe uitpakken?

1

Open de doos & de
vacuümverpakking

**2**

Laat het kussen enkele
uren liggen om zijn vorm
terug te krijgen

**3**


Ontspan en zit comfortabel,
zonder klachten

**Tip**

Combineren met een rugkussen

Het Jannu rugkussen ondersteunt je onderrug en vormt samen met het Monviso zitkussen de ideale combinatie. Terwijl het rugkussen je houding corrigeert, verlicht het stuitkussen de druk op je stuitje en heupen. Voor maximaal comfort en een gezonde zithouding, waar je ook zit.

Bekijk het [hier](#)

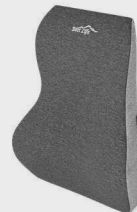

Materiaal en opbouw

*100% polyester,
anti-allergeen,
OEKO-TEX® gecertificeerd*

Buitenhoes



Traagschuim

*Hoogwaardig,
CertiPUR®
gecertificeerd*

Duurzaam verpakt

Onze innovatieve verpakking verkleint het volume met **70%**, wat zorgt voor lagere verzendkosten en **70% minder** CO₂-uitstoot. Jaarlijks besparen we meer dan **50.000 kg CO₂** – vergelijkbaar met de uitstoot van een auto die **11 keer** de aarde rondrijdt!



Wasvoorschriften

De buitenhoes is wasbaar op **30°C**.
Het traagschuim is niet wasbaar.



Garantie

Registreer je Monviso zitkussen binnen twee minuten voor twee jaar garantie. Bij een kapot of slap kussen sturen we je gratis een nieuw exemplaar. Als dank ontvang je een **klein cadeautje!**

Kapot of slap kussen? Geen zorgen!
Binnen een week sturen we je een nieuw exemplaar.



Scan eenvoudig de QR-code
om je garantie binnen
twee minuten te registreren

Of klik [hier](#)

Bedrijfsgegevens + contact

Bij Best Life draait alles om jouw comfort en tevredenheid.
Dus twijfel niet, wij vinden het leuk om van je te horen!

Heb je een vraag of feedback? Wij staan klaar om je te helpen!
Neem contact op via:



klantenservice@best-life.nl



www.best-life.nl