

Etos

Brandwonden hydrogel Kompres & pleisters

Het brandwondenkompres is een steriel hydrogel kompres die verkoelt en helpt pijn te verlichten bij kleine oppervlakkige brandwonden. De brandwondenpleister is een steriele hydrogel pleister die verkoelt en zorgt voor pijnverlichting bij kleine oppervlakkige brandwonden. Dankzij de hydrogel houdt de brandwondenpleister de wondomgeving vochtig, wat het wondgenezingsproces bevordert en de kans op littekenvorming verkleint.

Etos Brandwonden hydrogel kompres & pleisters zijn een Medisch Hulpmiddel.

Gebruiksadvies: de huid rondom de wond goed schoonmaken en drogen. Haal het kompres of de pleister, afhankelijk van de grootte van de wond, uit de folie verpakking en verwijder één helft van de beschermende folie aan de onderzijde aangeduid met het cijfer 1. Plak de vrije helft van de pleister of het kompres op de wond en verwijder daarna de tweede helft van de beschermende folie aangeduid met het cijfer 2. Druk de pleister of het kompres enkele seconden goed en gelijkmatig aan zodat de randen goed vastplakken. Verwijder dan vanuit het midden de beschermfolie van de bovenkant aangeduid met het cijfer 3. Laat de pleister of het kompres op zijn plaats totdat deze op natuurlijke wijze loslaat. Herhaal dit totdat het genezingsproces is voltooid. Voor het verwijderen van de pleister of het kompres één hoekje losmaken en dan de pleister of het kompres voorzichtig lostrekken.

Waarschuwing!

- Raadpleeg altijd een arts bij grote en diepe tweede- en derdegraads brandwonden!
- Niet gebruiken op geïnfecteerde wonden of bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor propyleenglycol.
- Raadpleeg een arts in geval van roodheid of allergie.

Let op! Laat de brandwondenpleister niet langer dan 4 uur op de huid zitten.

Bewaaradvies: koel en droog bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.

3 stuks



Pharmaplast S.A.E.
Amria free zone 23512
Alexandria Egypt



Toby's B.V.
Aalsmeerderweg 253-R
1432 CN Aalsmeer

EC REP

E C Rep Ltd.
5 Fitzwilliam Square East
Dublin 2, D02 R744
Ireland



Etos B.V.
Provincialeweg 11
1506 MA ZAANDAM
Nederland
etos.nl






STERILE R

REF

CUREASSORTED20

MD

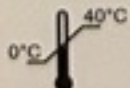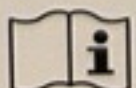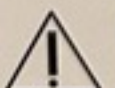

31061222T

8 710198 400521



MD



1413