

## Eigenschappen

Neusdouche voor een intensieve spoeling van de neus.

- Eenvoudige en efficiënte manier voor de dagelijkse verzorging van de neus.
- Spoelsysteem met regelbare druk.

## Gebruiksaanwijzing

- Vul de neusdouche met lauw water. Laat het ventiel horizontaal gesloten.
- Voeg de inhoud van een zakje Rhinicur® Nasaal Spoelzout toe en houd met de wijsvinger het gaatje in het deksel dicht. Schud tot het zout volledig is opgelost.
- Open het ventiel door naar boven te draaien.
- Plaats het ventiel tegen het neusgat en houd de mond open. De vloeistof vloeit automatisch in de neus, baadt de neuswanden en loopt naar buiten via het andere neusgat.

## Inhoud

Neusdouche + 4 zakjes Nasaal Spoelzout.