

HANDLEIDING
BenjaBeauty® Professionele Sterilisator
Dry-Heat reiniger

ITEM NO.:CH-360T



Inleiding

Het is bekend dat hoge temperaturen bacteriën en virussen kunnen doden die aan het artikel zijn bevestigd. De maximale temperatuur van onze CH-360T kan 220 graden Celsius bereiken. Dit apparaat wordt veel gebruikt in laboratoria, cateringdiensten en schoonheidssalons.

Parameters

Nominale spanning: 220V / 50Hz

Vermogen: 300w

Temperatuurbereik: 50 tot 220 graden

Timer: 1 tot 60 minuten

Gebruiksaanwijze

1. Sluit de bijpassende poederbron aan die wij leveren
2. Leg uw te steriliseren instrument op de schaal en sluit het deksel.
3. Pas de tijdkiezer aan volgens uw behoefte en activeer het apparaat. De rode indicator gaat branden, wat betekent dat het apparaat in de werkmodus staat. Pas vervolgens de temperatuurregelaar aan naar uw wensen en nu gaat het groene lampje branden. Beide lampjes gaan uit als het apparaat klaar is met werken. Houd er rekening mee dat geen van de indicatielampjes gaat branden als u alleen de temperatuurregelaar aanpast. Over het algemeen kunnen alle instrumenten en goederen in 15 minuten volledig worden gesteriliseerd en gedesinfecteerd bij 125 graden Celsius.
4. Pas de temperatuurregelaar aan door de linker knop te draaien
5. Koppel de voeding na elk gebruik los.



VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

1. Buiten het bereik van kinderen houden.
2. Na de sterilisatie de ring op de bak haken en deze uit het apparaat halen.
3. RAAK DE WARME LADE NIET MET UW HANDEN AAN!
4. Het is een sterilisator op hoge temperatuur, houd de hulpmiddelen nodig om te desinfecteren droog.
6. Niet geschikt voor plastic instrumenten, alleen voor roest vrij staal gereedschappen.