


Roege International

Gebruikershandleiding

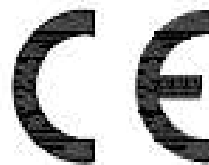

Toiletstoel

Belangrijk!

Lees voordat u de toiletstoel gebruikt aandachtig de gebruikershandleiding. Let goed op alle instructies, vooral op deze betreffende de veiligheid, en volg ze altijd op.

Juist gebruik

De toiletstoel is alleen bedoeld als zitting bij het toiletteren. Gebruik of bewaar de toiletstoel niet buitenshuis.



In hoogte verstellen.

U kunt de zithoogte verstellen door de klemmen onderaan de poten te verwijderen en de gewenste hoogte te kiezen. Daarna zet u deze hoogte vast door de klemmen weer in de stoelpoten te drukken. Controleer, nadat u de juiste hoogte heeft gekozen, of de klemmen weer vastgeklikt zijn en alle 4 de stoelpoten op dezelfde hoogte zijn afgesteld.

Reinigen

Het schoonmaken van de toiletstoel moet regelmatig gebeuren. Het toiletstoel kan afgenomen worden met een natte doek. Bij sterke verontreiniging kan er een mild schoonmaakmiddel worden gebruikt.

Garantie

De fabrikant geeft u een garantie van 1 jaar. Deze garantie vervalt bij schade door onjuist gebruik van het product. Als u schade constateert neemt u dan meteen contact op met Roege International. De garantie dekt geen ongelukken of andere schade eventueel gerelateerd aan het niet functioneren van het product

Toiletstoel

Zitbreedte	44cm
Zitdiepte	40cm
Zithoogte	46- 60cm
Totale breedte	61cm
Totale hoogte	85- 99cm
Hoogte armleuningen	70cm
Maximale belasting	130kg
Totaal gewicht	7,5kg

Roege International

Postadres:

Postbus 581

9400 AN Assen

Telefoon: 0592-344716/ 0031592-344716

Fax 0592-344106/ 0031592-344106

Mail: info@roegeint.com

Website www.roegeint.com

Bank ING bank 67.21.74.383

Btw nummer NL 8173.42.138B01

KvK nummer 04084054

UNGM registratie 140407