

VP, Oorspuit gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Was de spuit voor gebruik met warm water en zeep goed uit en laat drogen. Herhaal dit altijd tussen de gebruiksmomenten door.

Plaats spuitkop op de bovenkant van spuit en draai met de klok mee de spuitkop op z'n plek. Reinig spuit met schoon water voor elk gebruik

Om spuit te vullen met lauw (handwarm) water, eerst spuit helemaal indrukken zodat er geen lucht meer in zit. Dan de plaatst u de spuitkop in het water en trekt u de spuit vol door plunjer uit te trekken tot spuit helemaal gevuld is.

GEBRUIK NOOIT KOUD OF HEET WATER OM OREN TE REINIGEN.

NOOIT DE SPUIT GEBRUIKEN OM OREN MEE TE REINIGEN WANNEER SPUITKOP ER NIET OP ZIT.

Schoonspuiten van de oren

Ga altijd zitten als u de oren uit gaat reinigen en houdt een kom of schaal onder uw oor. Het hoofd mag iets gekanteld worden richting het te reinigen oor. Zachtjes brengt u dan de Spuitkop in uw oor. Druk nu langzaam de plunjer van de spuit zodat er water uit de spuitkop komt en het oor gespoeld wordt. Herhaal deze stappen totdat oor volledig gereinigd is. Reinig spuit en spuitkop grondig na gebruik.

WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen die tot verstikking kunnen leiden. Uit de buurt houden van kleine kinderen.

Niet gebruiken als:

- Oorpijn of ontsteking aan het oor kanaal
- Uitslag heeft aan het oor
- Als u beschadigingen heeft aan het trommelvlies
- Als u buisjes heeft
- Als u reeds bent geopereerd ben aan de

Heeft u een medische aandoening of 1 van de klachten zoals hierboven omschreven? Raadpleeg altijd uw arts als u twijfelt over het gebruik van de oorspuit.