

Gipshoes

- Houdt gips en verband droog tijdens het douchen of baden
- Eenvoudig aan te trekken
- Herbruikbaar
- Verkrijgbaar voor handen, voeten, armen en benen

FS-2100 Arm kort
FS-2101 Arm lang
FS-2102 Voet
FS-2103 Been kort
FS-2104 Hand
FS-2105 Been lang

Instructies voor gebruik:

- 1 Vijl / schuur eventuele scherpe kantjes van het gips af voordat u de gipshoes om het gips plaatst.
- 2 Trek het gat in de silicone ring voorzichtig open en plaats de gipshoes met de ring over het gips of verband.
- 3 Druk de ring tegen het gips of verband voor een goede afsluiting.
- 4 Na het douchen droogt u de hoes af alvorens deze af te doen.

Waarschuwing

Voor therapeutisch gebruik en dagelijks gebruik bij douchen en baden. Niet geschikt voor recreatief gebruik. Let op: natte hoes kan glad zijn. Bij gebruik in bad niet op de ring leunen. Kinderen mogen de gipshoes uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene. Raadpleeg uw arts wanneer er klachten ontstaan ten gevolge van het gebruik van de gipshoes (bijv. zwellingen).



Medical Device

Basic UDI-DI : 69422726P4.01.01XD