



www.mobinova.nl

Gebruiksaanwijzing

Mobinova Rollator Outdoor Flex 2.0



Lees deze instructies nauwkeurig door en volg de aanwijzingen op.

Het niet opvolgen van de instructies kan resulteren in verwondingen bij de gebruiker of schade aan de rollator.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek.

Gebruik van de rollator

Deze lichtgewicht 4-wiel rollator is bedoeld als ondersteuning en hulp voor personen die moeilijkheden ondervinden bij het lopen of ondersteuning nodig hebben voor hun gevoel van balans.

De rollator kan vooral buitenshuis gebruikt worden, maar ook binnenshuis. Het frame is eenvoudig opvouwbaar en neemt na opvouwen slechts weinig ruimte in.

Veiligheids tips - Do's and Don'ts -

- Overschrijd het gewicht van de gebruiker van maximaal 135 kg niet.
- Gebruik de rollator niet op een trap of roltrap.
- Duw de rollator niet als er iemand op de zitting zit.
- Gebruik de zitting niet om een persoon of voorwerpen mee te transporteren.
- Gebruik de zitting nooit zonder de rugleuning.
- Ga niet op de zitting zitten als de rollator op een hellend vlak staat.
- Gebruik de rollator alleen als hulp bij het lopen.
- Gebruik de rollator niet om achteruit te lopen.
- Gebruik uitsluitend de geschikte accessoires en door de dealer ter beschikking gestelde onderdelen.
- Voorwerpen moeten uitsluitend in de meegeleverde tas meegenomen worden. Hang geen zware artikelen aan de handgrepen, dit kan de rollator onstabiel maken.

Voorzorgsmaatregelen - vóór gebruik –

- Zorg dat het frame volledig uitgeklaapt en **goed vergrendeld** is.
- Controleer de remmen voordat u gaat lopen.
- Verzekert u ervan dat alle delen goed vastzitten en goed functioneren.

Voorzorgsmaatregelen -tijdens gebruik -

- Laat de rollator niet rijden als iemand op de zitting heeft plaatsgenomen. Ernstige verwondingen bij de gebruiker en/of beschadiging van het frame of de wielen kunnen het gevolg zijn van onjuist gebruik.
- Gebruik de rollator niet om achteruit te lopen.
- Wees voorzichtig bij het passeren van een stoeprand of andere onregelmatigheden. Pas ook extra op bij het lopen over een hellend vlak en ongelijke of gladde ondergrond. Niet voldoende oppassen kan een grote kans opleveren voor een val en/of verwonding.
- Verander geen instellingen aan de rollator tijdens het gebruik.
- Wees extra voorzichtig als u artikelen meeneemt in de boodschappentas (maximaal gewicht 5 kg).
- Zorg ervoor dat alle 4 wielen een constante grip op de weg hebben.
- Zet de rem op de parkeerstand **voordat** u gaat zitten.
- Als u op de rollator zit, houdt dan altijd de parkeerrem in gebruik.

Lijst met onderdelen

- 1 frame, gemonteerd.
- 2 achterwielen, gemonteerd.
- 2 voorwielen, met afneembare voorvorken.
- 1 zitting, gemonteerd, met trekhengsel.
- 2 handgrepen met remhendels, gemonteerd.
- 1 rugleuning, gemonteerd
- 1 afneembare boodschappentas, los
- 1 fietsbel, gemonteerd (kan verwijderd worden door zwarte ring los te draaien)
- 1 luchtpompje, los
- 1 bakje van stokhouder, vast te klikken op onderste gedeelte van het frame. Bevestig het niet als je geen stokhouder nodig is. Bovenste deel van de stokhouder is gemonteerd op de linker handgreep.

Uitpakken en gebruiksklaar maken van de rollator

De rollator is opgevouwen in een kartonnen doos verpakt.

- Neem de rollator uit de doos, verwijder de plastic zak en riem met klittenband en controleer of de rollator compleet en onbeschadigd is.
- Zet de Mobinova Outdoor Flex 2.0 met de achterwielen op de grond en trek beide handgrepen omhoog.
- De driehoekige plastic scharnieren moeten goed over beide onderste buizen van het frame vallen.
- Maak 1 kant van het beugeltje los dat beide zijdes van de zitting bij elkaar houdt en trek nu de zijkanten uit elkaar



- Duw nu met de palmen van beide handen de zijkanten van de zitting stevig naar beneden totdat deze beiden vastklikken.



- Zorg ervoor dat de handgrepen recht omhoog staan
- Duw het kleine hendeltje met de platte zijde naar de buizen toe (Fig1). Duw de hendeltjes niet te strak aan voordat alles op zijn plaats zit.
- Om het hendeltje vast te zetten, draai je het naar achteren (Fig 2) en schuif je deze onder het uitstekende plastic clipje op het scharnier (Fig 3).
- Doe dezelfde handelingen voor de andere zijde van het frame.



fig 1



fig 2



fig 3

- De Mobinova Outdoor Flex is nu geheel uitgevouwen.
- Controleer of alle bevestigingspunten goed vergrendeld zijn.

Schuif de voorwielen met de kleine hendeltjes nu in het frame. Er is 1 wiel voor de linkerkant en 1 wiel voor de rechterkant. De hendeltjes horen aan de binnenzijde van het frame te zitten. Controleer of de goudkleurige nippeltjes aan de buitenzijdes goed in de gaatjes gevallen zijn. Vergrendel elk voorwiel nu door het hendeltje met de platte kant tegen het frame aan te duwen.



Instellen van handgrepen

- Beide armleuningen zijn voorzien van een zwarte vierkante aluminium pijp. Deze pijp valt in de iets ruimere, verticale pijp van het frame. De hoogte van de handgrepen kan aangepast en vastgezet worden door de metalen beugeltjes omhoog of omlaag te bewegen.
 - Laat beide armen langs de zijkant van het lichaam hangen.
 - Stel de handvatten in op polshoogte (kies de juiste stand om te vergrendelen).
 - Zorg ervoor dat beide handvatten op de gelijke stand staan
- De rugleuning is niet vooraf gemonteerd. Buig de klemmen van de rugleuning over de zwarte verticale pijp en zet deze vast op de gewenste hoogte met de meegeleverde draaiknoppen.



Opvouwen, na gebruik

Trek de lus op de zitting omhoog en de zijkanten van het frame vouwen naar elkaar toe.

Je kunt ook de handgrepen naar beneden bijstellen, maar dat is niet vereist. Trek daarvoor aan de hoogteverstellers en duw de handgrepen dan naar beneden.



Gebruik de klem bij de zitting om de zijkanten tegen elkaar aan te houden.



Maak de hendeltjes bij de scharnieren onderaan het frame los en duw de beide handgrepen achterwaarts en naar de grond.

Vastmaken van de tas

Schuif de lussen aan beide zijkanten van de tas geheel over de 2 uitstekende stangetjes.



Gebruik van de remmen

1. Om de parkeerrem te gebruiken, duw je beide remhendels naar beneden. Om de parkeerrem weer uit te schakelen, knijp je 1 keer in beide remhendels. Gebruik **ALTIJD** beide hendels gelijktijdig.



2. Om kort te remmen of de snelheid iets te verminderen, knijp je beide remhendels in. Knijp ze gelijktijdig in om te voorkomen dat de rollator naar links of rechts stuurt.



Vervoer van de rollator

De voorwielen van deze Mobinova Outdoor Flex 2.0 rollator zijn afneembaar, dit is handig als de rollator in een kleine ruimte moet passen (auto kofferbak of achterbank)

1. Buig het hendeltje los.
2. Druk het knopje in en trek de voorvork uit het frame.



Onderhoud en schoonhouden

- - Verwijder vuil altijd direct na gebruik van de rollator. Gebruik hiervoor een schone doek met uitsluitend water en eventueel een zachte reiniger.
 - Gebruik geen schuurpons of agressieve schoonmaakmiddelen en maak de schoongemaakte delen droog.
 - Als de Mobinova Outdoor Flex 2.0 wordt gebruikt op het strand of nabij de zee, bedenk dan dat zout water en/of zoute lucht corrosie veroorzaakt op metalen delen. Maak delen die hieraan zijn blootgesteld dan meteen schoon met zoet water en maak ze droog.
 - Controleer regelmatig of de rem goed functioneert, de verbindingstukken intact zijn en er geen scheurtjes in het frame zichtbaar zijn.
 - Bewegende delen kunt u behandelen met een siliconen spray.
 - Gebruik geen vet of normale olie op de plastic onderdelen.
 - Metalen bewegende delen van de remmen (zoals remkabels) moeten regelmatig gesmeerd worden met een dunne olie.

Specificaties:

- Afmetingen in gebruik (L*B*H): 78*64*85-93 cm
- Afmetingen in breedte opgevouwen (L*B*H): 78*30*85-93 cm
- Afmetingen opgevouwen in breedte en hoogte (L*B*H): 93*30*40 cm (zonder voorwielen)
- Hoogte handgrepen: 85↔93 cm (instelbaar)
- Afmeting zitting: breedte 46 cm, diepte 28 cm
- Hoogte zitting: 55 cm
- Gewicht netto: 10,7 kg
- Wielmaat: 12" x 2.25", Aanbevolen bandendruk: Maximum 2.0 Bar (= 20 PSI)
- Maximum toelaatbaar gewicht: 135 kg

Garantie

De fabrieksgarantie op de Mobinova Outdoor Flex 2.0 bedraagt 12 maanden en geldt voor productie en/of fabricage fouten.

De wettelijke garantietermijn is eveneens 12 maanden en alleen geldig na overlegging van een aankoopbewijs. Mobinova staat er voor in dat dit artikel voldoet aan de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Garantie is uitgesloten indien de producten beschadigingen vertonen als gevolg van ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen.

Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage zijn uitgesloten van garantie. Het betreft dan onderdelen zoals wielen, remkabels, zittingen en kleine beschadigingen ontstaan door normaal gebruik van het product.



Model: Mobinova Outdoor Flex 2.0
Model nr: 7436911627679