

# Boots Pharmaceuticals Reisbandjes 12+ jaar 1 Paar

EAN 5045094297931



These principles may help prevent travel sickness. Acupressure (Yang) is thought to affect the digestive system.

**DIRECTIONS:** A band should be placed on the inside of the wrist. To find the correct position, place the first and second fingers on the inside of the wrist. The correct position is where the first and second fingers meet the thumb. The button should be placed on the inside of the wrist.

**CARE:** Wash in cold water. Do not use a washing machine. Do not use bleach. Do not use fabric softener. Do not use iron. Do not use dry cleaning.

**FIBRE:** 100% Cotton.

Reisziekte bij kinderen is een lastig probleem, vooral omdat de meeste medicijnen tegen reisziekte niet aan jonge kinderen gegeven mogen worden. Daarom kiezen veel ouders voor een niet-medicinale oplossing. Deze methode maakt gebruik van oude Chinese beginselen van acupressuur. Veel mensen hebben ervaren dat het dragen van de banden aan beide polsen kan helpen misselijkheid onder controle te houden, inclusief alle vormen van wagenziekte. Bij acupressuur wordt aangenomen dat het helpt de balans van negatieve (Yin) en positieve (Yan) ionen in het lichaam te herstellen. Onevenwichtigheden zouden de gezondheid schaden.

**Gebruiksaanwijzing:** Plaats drie vingers aan de binnenkant van de pols (kinderen en volwassenen dienen hun eigen vingers te gebruiken om de juiste afstand te krijgen) met de top van de ringvinger onder de aanzet van de hand. Het Nei-Kuan punt ligt recht onder de top van de wijsvinger tussen de 2 middelste pezen (zie figuur). Plaats het knopje met de bolle kant op het Nei-Kuan punt. Herhaal dit proces voor de andere pols. Voor het beste resultaat dient om beide polsen een band te worden aangebracht. Kan ook gedragen worden tijdens de slaap.

**Wasinstructie:** Handwas met zeep of mild wasmiddel.

X253

Distributed by The Boots Company PLC, Nottingham, England NG2 3AA

Sea Band Ltd, 8 Hawley Rd, Hinckley, LE10 0PR.

Text revised 08/18

FIRST WRIST CREASE  
THIRD FINGER  
MIDDLE FINGER  
INDEX FINGER  
NEI KUAN POINT (PLACE BUTTON HERE)  
FLEXOR TENDONS