


# GEBRUIKSAANWIJZING

## DRUGSTESTSTRIP COCAÏNE (COC)

Met de cocaïne drugsteststrip van Telano detecteert u eenvoudig of er afbraakproducten van cocaïne in de urine zitten. Op de strip is de afkorting te zien van de soort drugs waarvoor de test bestemd is (COC). Lees voor het gebruik van de test zorgvuldig deze handleiding door voor een betrouwbaar testresultaat en een juiste interpretatie van het testresultaat. Deze test is geschikt voor professioneel en thuisgebruik.

### Testprocedure

1. De test en urine dienen op kamertemperatuur te zijn.
2. Vang wat urine op in een schoon bakje of bekertje.
3. Dompel de strip in de urine met het pijluiteinde in de richting van de urine.  
Let op! De strip mag niet verder dan de MAX-streep ondergedompeld worden.
4. Houd de strip 10 - 15 seconden in de urine zodat de strip voldoende urine bevat.
5. Leg de test op een vlakke niet-absorberende ondergrond met het testvenster naar boven.
6. U ziet nu dat er in het testvenster 1 of 2 lijnen tevoorschijn komen. Lees tussen de 5 en 8 minuten het testresultaat af. Let op: wacht niet langer met beoordelen van de testresultaten dan 10 minuten. Deze uitslag kan namelijk ongeldig zijn.

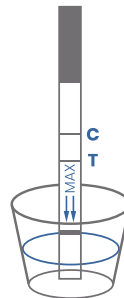

**DOMPEL  
DE STRIP  
IN DE URINE**

Dompel de strip niet verder dan de MAX-streep

### Resultaat

**2** LEG DE TEST OP EEN  
VLAKKE ONDERGROND



**3** LEES HET RESULTAAT  
NA **5 MINUTEN** AF



**Negatief:** Er verschijnen 2 lijnen in het testvenster. Zowel de testlijn (T) als de controlelijn (C) zijn zichtbaar. Er is geen afbraakproduct van de geteste drugs gevonden in de urine. Let op: De kleurintensiteit van de (C) en (T) lijn kan variëren. Ook een licht gekleurde (T) lijn is negatief.

**Positief:** Er verschijnt alleen een controlelijn (C). De testlijn (T) verschijnt niet. Dit betekent dat de testpersoon een afbraakproduct van de desbetreffende drugs in zijn of haar urine heeft.

**Ongeldig:** Er verschijnt geen lijn in het controle(C)venster. Herhaal de test met een nieuwe test. Het kan zijn dat er niet genoeg urine is geabsorbeerd. Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met Telano.

## Verpakkingsinhoud

1. Een drugsteststrip
2. Droogmiddel
3. Bijsluiters

## Benodigheden

1. Klok of timer
2. Schoon bakje

## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze bijsluiters goed door voordat u begint met testen.
2. Alleen voor in-vitro gebruik.
3. Alleen voor extern gebruik, niet doorslikken.
4. Gebruik deze test niet na de houdbaarheidsdatum.
5. Open het foliepakje pas wanneer u klaar bent om te testen. Gebruik de test niet wanneer u ziet dat het foliepakje is beschadigd of al open is.
6. Deze test is niet geschikt voor hergebruik. Na gebruik kan de test bij het afval.
7. Raak de absorberende strip van de test niet aan.
8. Houd deze test buiten het bereik van kinderen.

## Bewaren

De drugstest moet worden bewaard in het ongeopende foliepakje bij een kamertemperatuur tussen de 2 en 30° C. Vries de test niet in.

## Hoelang zijn de afbraakproducten van cocaïne aantoonbaar in de urine?

De afbraakproducten van cocaïne zijn nog ongeveer 1-4 dagen aantoonbaar in de urine. Factoren als lichaamsgewicht en de mate van gewinning kunnen invloed hebben op het aantal dagen dat cocaïne nog aantoonbaar is in de urine. De COC-drugsteststrip van Telano is zeer gevoelig waardoor een zeer kleine concentratie (300 ng/ml) al te detecteren is.

Blijf in geval van een positief testresultaat kalm en probeer rationeel te denken en te handelen. Schakel eventueel de hulp in van de huisarts of een verslavingszorginstelling.

## Betekenis symbolen



Houd-  
baar  
tot



LOT  
nummer



Deze ver-  
pakking  
bevat één  
test



Alleen voor  
in-vitro  
gebruik



Niet op-  
nieuw ge-  
bruiken



Bewaren  
tussen 2°C  
en 30°C



Buiten  
bereik van  
kinderen  
bewaren



Lees voor  
gebruik de  
gebruiks-  
aanwijzing



Fabriek: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd  
Building 15, Building 12 (west) – No. 1692 Xinghu Avenue  
Nantong Economy & Technology Development Zone  
226010 Nantong – P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GMBH (Europe)  
Eiffestraße 80, D – 20537 Hamburg – Deutschland



De algemene voorwaarden  
van Telano zijn te  
vinden op  
[www.thuistestenkopen.nl/](http://www.thuistestenkopen.nl/)  
algemene-voorwaarden