



## Speelkaarhouder (set van 2)



**VM705**

## Gebruiks- en onderhoudsinstructies

## **INLEIDING Bedankt**

dat u hebt besloten om de speelkaarthouders van Aidapt te kopen. De speelkaarthouders zijn vervaardigd uit de beste materialen en componenten die beschikbaar zijn en zijn bij correct gebruik ontworpen om vele jaren betrouwbare, probleemloze service te bieden.

## **VOOR GEBRUIK**

Verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, aangezien dit het oppervlak van het product kan beschadigen.

Controleer het product op zichtbare schade. Als u schade ziet of een defect vermoedt, gebruik uw product dan niet, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

## **BEOOGD GEBRUIK**

De set van 2 speelkaarthouders is voorzien van een gleuf die groot genoeg is voor maximaal 15 speelkaarten van standaardformaat, die eenvoudig in de houder kunnen worden geschoven. De kaarten worden vastgegrepen en op hun plaats gehouden door de rubberachtige binnencoating en kunnen op een vlakke ondergrond worden geplaatst dankzij de ingebouwde voetjes met antislip rubberen pads.

## **REINIGING**

Maak uw speelkaarthouders schoon met een mild reinigingsmiddel en uitsluitend met een licht vochtige, zachte doek. Gebruik uitsluitend een mild reinigings- of desinfectiemiddel; gebruik nooit een schuurmiddel. Dompel de speelkaarthouders niet onder.

Gebruik na het schoonmaken een zachte, droge doek om de speelkaarthouders af te vegen.

## **VERZORGING & ONDERHOUD**

Voer regelmatig een veiligheidscontrole van het product uit, of als u dat heeft zorgen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE De**

informatie in dit instructieboekje mag niet worden opgevat als onderdeel van of als vaststelling van enige contractuele of andere verbintenis door Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd of haar agenten of haar dochterondernemingen en er wordt geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de informatie. .

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; als gebruiker moet u de aansprakelijkheid aanvaarden voor de veiligheid bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage/het gebruik van uw product.

**Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX Telefoon: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: [www.aidapt.co.uk](http://www.aidapt.co.uk) E-mail: [accounts@aidapt.co.uk](mailto:accounts@aidapt.co.uk) • [aanpassingen@aidapt.co.uk](mailto:aanpassingen@aidapt.co.uk) • [sales@aidapt.co.uk](mailto:sales@aidapt.co.uk)**



## **Kaartspelhouder (set van 2)**



**VM705**

**Kennisgeving van gebruik**

## **INLEIDING Bedankt**

voor uw aankoop van de Aidapt-kaartspelstandaard.

Deze is gemaakt met de beste materialen. Als u het correct gebruikt, zult u er lange tijd volledige tevredenheid mee hebben.

## **VOOR GEBRUIK Verwijder**

voorzichtig de verpakking. Vermijd het gebruik van een mes of ander scherp gereedschap, omdat dit de coating van het product zal beschadigen.

Controleer of het product in goede staat verkeert. Indien u twijfelt of vermoedt dat er sprake is van een defect, gebruik het product dan niet en neem contact op met uw dealer.

## **AANBEVOLEN GEBRUIK Elke houder**

heeft een brede gleuf die plaats biedt aan maximaal 15 standaardspelkaarten, die eenvoudig in de kaartspelhouder kunnen worden geschoven.

De kaarten worden op hun plaats gehouden door de rubberen coating aan de binnenkant en kunnen op een vlakke ondergrond worden geplaatst dankzij de voetjes die zijn voorzien van antislip rubberen pads.

## **REINIGING**

Maak uw kaartspelhouder schoon met een mild schoonmaakmiddel en een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen of schurende schoonmaakproducten.

Dompel de kaartspelhouder niet onder in water.

Gebruik na het schoonmaken een droge, zachte doek om het kaartspel af te vegen.

## **ONDERHOUD**

Controleer regelmatig de staat van uw product.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE De**

informatie in deze kennisgeving mag niet worden geïnterpreteerd als de vaststelling van of als onderdeel van een contract of verbintenis door Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt Wales Ltd, noch haar dochterondernemingen of agenten, en er wordt geen garantie gegeven op de gegeven informatie.

Als gebruiker moet u uw gezond verstand gebruiken en geen onnodige risico's nemen bij het gebruik van het product; de gebruiker moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid bij het gebruik van het product.

**Altai Frankrijk (Altai Europa Ltd)**  
**ZA du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, Frankrijk**  
**Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: [altaieurope@orange.fr](mailto:altaieurope@orange.fr)**