

Gebruiksaanwijzing

Rollator

Nova



Gebruiksaanwijzing

Rollator Nova

Nederlands

Versie MDR1.0
01-2024

3	Voorwoord
3	Verklaring van overeenstemming
3	Productsticker
3	Garantie
3	Levensduur
3	Hergebruik
3	Verwijdering
3	Inhoud van de doos
4	Onderdelen van de Nova
5	Indicatie
5	Veiligheidsinstructies
6	Montage
6	Hoogteverstelling handvatten
6	Remmen en parkeren
6	Rem afstellen
7	Zitten
7	Opvouwen
7	Uitklappen
7	Reiniging en onderhoud
8	Specificaties

Voorwoord

Wij zijn blij dat u een product van Parvum heeft gekozen.


U zult tevreden zijn met de vormgeving, functionaliteit en kwaliteit van dit product.

Wij raden u aan om voor het eerste gebruik de bijgeleverde gebruikshandleiding zorgvuldig door te nemen. Deze bevat essentiële veiligheidsvoorschriften en nuttige adviezen voor correct gebruik en onderhoud van het product. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de winkel waar u dit product heeft aangeschaft.

Verklaring van overeenstemming

De fabrikant bevestigt dat het genoemde product voldoet aan de EU-verordening 2017/745 voor medische hulpmiddelen.

Productsticker

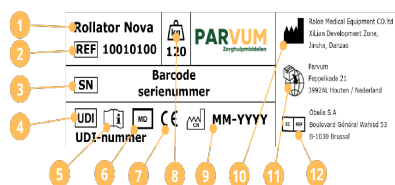

1. Productnaam | 2. Artikelnummer |
3. Serienummer | 4. Udi-nummer | 5. Lees gebruiksaanwijzing | 6. Medisch product | 7. CE
8. Gebruikersgewicht | 9. Productiedatum (maand-jaar) | 10. Fabrikant | 11. Importeur | 12. EC-REP

Garantie

Ons product komt met een garantieperiode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Als er zich een aantoonbare materiaal- of fabricagefout voordoet, vervangen we beschadigde onderdelen zonder kosten.

Slijtageonderdelen vallen over het algemeen niet onder deze garantie, behalve als reparatie of vervanging van deze onderdelen noodzakelijk is door een onmiskenbare fabricage- of materiaalfout.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen op basis van technische verbeteringen of veranderingen in het design.

De garantie is niet van toepassing op de volgende onderdelen: wielen (inclusief banden, velgen, lagers, enz.), remmen (remhendels, remkabels, remblokken, enz.), handvatten, rugsteun en zitting.

Levensduur

Onze onderneming schat de levensduur van dit product op 4 jaar, mits het wordt gebruikt zoals bedoeld en alle onderhouds- en servicevoorschriften worden opgevolgd.

De levensduur kan significant verlengd worden als het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt binnen de technische grenzen van de huidige wetenschap en techniek.

Let wel, intensief gebruik of oneigenlijke toepassing kan de levensduur verkorten. Deze schatting van de levensduur door onze onderneming impliceert geen extra garantie.

Hergebruik

Dit product is ontworpen voor hergebruik. Wanneer u het product doorgeeft aan een nieuwe gebruiker, zorg er dan voor dat u ook alle technische documentatie die essentieel is voor veilig gebruik meegeweet.

Voor hergebruik dient het product gecontroleerd, gereinigd en in oede staat gebracht te worden door de specialzaak.

Eventuele accessoires voor dit product zijn verkrijgbaar bij de winkel waar u dit product heeft aangeschaft.

Verwijdering

Indien u besluit dat u het product niet meer nodig heeft, neem dan contact op met de winkel waar u het gekocht heeft, of breng het product naar een lokaal afvalinzamelpunt.

Inhoud van de doos

1 x	Rollator Nova
1 x	Tas
1 x	Rugsteun
1 x	Stokhouder
1 x	Gebruiksaanwijzing

Onderdelen van het product



1. Handvat
2. Remhendel
3. Hoogteverstelling handvat
4. Rugsteun
5. Zitting

6. Opbergnetje
7. Rem
8. Achterwiel
9. Voorwiel

Rollator

Indicatie

Indicatie:

Deze rollator is bedoeld voor zowel buiten- als binnengebruik om mensen met beperkte mobiliteit te ondersteunen of hun mobiliteit te verbeteren. Het doel van deze rollator is om de mobiliteit van de gebruiker te compenseren of te verbeteren, zoals het uitbreiden van de actieradius of mobiliteit.

Gebruikers met beperkingen in de hand- of armfuncties hebben mogelijk een speciale afstelling of aanpassing van de grepen of hand-/armsteunen nodig. Voor mensen met evenwichtsstoornissen kunnen verrijdbare loophulpen ongeschikt zijn; dit dient individueel getest te worden. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat een begeleider aanwezig is.

De rollator is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij normale, dagelijkse activiteiten.

Contra-indicatie:

Het gebruik van de rollator wordt afgeraden voor personen met waarnemingsstoornissen, ernstige evenwichtsstoornissen, of het onvermogen om te zitten.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de rollator uitsluitend als ondersteuning bij het lopen.
- Zorg ervoor dat de rollator alleen gebruikt wordt op een vlakke, stevige ondergrond.
- De rollator is niet bedoeld als zitplaats in voertuigen, zoals bussen of treinen.
- Het is niet toegestaan om op de rollator te staan of om personen of dieren met de rollator te vervoeren.
- Houd rekening met het maximale toelaatbare gewicht van de gebruiker. Deze informatie kunt u vinden in de technische specificaties in de gebruiksaanwijzing of op de productsticker.
- Gebruik de mand van de rollator alleen om voorwerpen te vervoeren en overbelast deze niet. De maximale belasting is 5 kg.
- De rollator is niet bedoeld als trippelstoel.

Veiligheidsinstructies

- Het is strikt verboden de rollator te gebruiken op roltrappen en soortgelijke bewegende oppervlakken.
- Hang geen tassen aan de rollator, aangezien dit het risico op kantelen verhoogt.
- Gebruik op hellende wegen altijd de looprem door de remhendel in te knijpen.
- Leun niet te zwaar op de handvatten, aangezien dit kan leiden tot het naar achteren kantelen van de rollator.
- Wees voorzichtig bij het uitvouwen of samenvouwen van de rollator om beknelling van kleding of lichaamsdelen te voorkomen.
- Bescherm uw rollator tegen langdurige blootstelling aan zonlicht, omdat bepaalde onderdelen warm kunnen worden en huidletsel kunnen veroorzaken bij aanraking.
- Zorg ervoor dat u vóór elk gebruik controleert of uw rollator in goede staat is, en dat alle verstelbare onderdelen stevig vastzitten. Controleer ook of de remmen naar behoren functioneren.
- Voer regelmatig een controle uit op de schroeven van de rollator en draai ze indien nodig aan.
- De effectiviteit van de remmen kan afnemen naarmate de wielen slijten. Controleer daarom regelmatig zowel de werking van de remmen als de staat van de banden.
- De rollator mag niet worden opgetild aan de zitting, afneembare onderdelen of de remkabels.
- Elk ernstig incident dat in verband staat met het gebruik van het product dient gemeld te worden bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de gebruiker gevestigd is.

Montage

De rollator wordt compleet in de doos afgeleverd, waarna u met enkele simpele handelingen de rollator gebruiksklaar kunt maken. Hiervoor is geen gereedschap nodig.

Pak het frame uit de doos en steek de stang met de voorwielen aan de voorkant van de rollator erin. Deze kunt u met de meegeleverde clips vastzetten op de gewenste hoogte. De hoogte die u kiest, bepaalt de uiteindelijke zithoogte.



Steek vervolgens de achterwielen in het frame, let op dat de wielen aan de buitenkant van het frame bevinden en niet aan de binnenzijde. Door middel van de drukknop kunt u de hoogte bepalen van de achterwielen. Let op: zet deze op dezelfde hoogte als dat u met de voorwielen gedaan heeft.



Plaats de handvatbuis zodanig in de buis van het frame dat deze minimaal tot aan de eerste doorboring reikt. Duw daarna de stervormige knop-schroef van buitenaf in het frame en draai deze met de hand vast door naar rechts te draaien.



U kunt de rugsteun op de rollator bevestigen door de drukknop op de rugsteun in te drukken aan beide kanten en deze in de houder te plaatsen. Dit moet u aan beide kanten doen, waarna de rugsteun bevestigd is.

Hoogteverstelling handvatten

Een nuttige tip is om de handvatten op polshoogte in te stellen. Laat de gebruiker achter de rollator staan, rechtop met de armen ontspannen langs de heupen. Pas dan de hoogte van de duwhandvatten aan zodat deze op polshoogte zijn. Afhankelijk van de gebruiker kan een standje hoger of lager comfortabeler zijn. Raadpleeg voor de optimale instelling uw zorgverlener.

Remmen / parkeren

Wanneer u wilt remmen tijdens het lopen met de rollator, knijpt u in beide remhendels naar boven. Zorg dat u langzaam en gelijkmatig remt met beide handen.

Om de rollator te parkeren of vast te zetten, drukt u de remhendels omlaag totdat u een klik hoort, wat aangeeft dat de parkeerrem is geactiveerd. Om de parkeerrem los te maken, knijpt u in beide remhendels tot ze in de middelste stand zijn en dus ontgrendeld.

Let op: de remmen kunnen minder effectief worden naarmate de banden slijten. Controleer daarom regelmatig de remwerking van uw rollator.

Rem afstellen

Als de rem van de rollator te zwak of te krachtig reageert, kunt u dit aanpassen door de stelschroef bij het remblok losser of vaster te draaien. Lukt het niet om dit zelf te doen? Neem dan contact op met de winkel waar u de rollator heeft aangeschaft. Ook een lokale fietsenmaker kan vaak assistentie bieden bij het afstellen van de rem.

De rem is correct afgesteld als de rollator effectief remt zonder dat er slepende geluiden ontstaan tijdens het lopen met de rollator.

Zitten

Zet de rollator op een vlakke en stevige ondergrond. Vergrendel de remmen door de remhendels naar beneden te duwen totdat u een klik hoort. Zorg ervoor dat de rollator stabiel staat en niet kan wegglijden. Als u gaat zitten, blijf dan rechtop zitten en leun niet naar achteren.

U mag alleen op de rollator zitten met uw rug naar de voorwielen toe.

Opvouwen

Om de rollator op te vouwen, tilt u eerst de zitting omhoog (stap 1). Trek vervolgens aan de opvouwhendel (stap 2). Hierdoor zullen de voorwielen richting de achterwielen vouwen.

U kunt de rugsteun omhoog klappen om ruimte te besparen.



Uitklappen

Plaats de rollator op de wielen en druk de opvouwwstang naar beneden totdat deze de zittingstang raakt en klap de zitting weer naar beneden.

Reiniging & Onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met behulp van een vochtige doek.
- Vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Vermijd ook reinigingsmiddelen met een hoog gehalte aan chloor of azijn.
- Voor desinfectie is het gebruik van een desinfecterende spray toegestaan.
- Controleer de schroeven van het product regelmatig en draai ze zo nodig aan.
- Het product mag niet langdurig worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 60 graden Celsius, zoals in een sauna.
- Bij defecten dient u contact op te nemen met de winkel waar u dit product hebt aangeschaft.
- Controleer regelmatig de conditie van de banden. De banden zijn lekvrij en vereisen geen controle van de bandenspanning of het oppompen ervan. Wel is het belangrijk om ze te controleren op scheuren of andere beschadigingen.
- Het is raadzaam om uw rollator minimaal 1 keer per jaar te laten onderhouden. Vraag bij de winkel waar u dit product heeft gekocht

Specificaties

Specificaties	Nova
Totaal gewicht	7,1 kg
Gewicht zonder rugsteun	6,9 kg
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Handvathoogte (afhankelijk van zithoogte)	84 tot 100 cm
Zithoogte (4 stappen)	55 tot 63 cm
Zitbreedte (zitting)	37,5 cm
Lengte	64 cm
Breedte	61 cm
Opgevouwen lengtemaat	33 cm
Max. belasting tas	5 kg
Frame materiaal	Aluminium

Gebruiksaanwijzing

Rollator Nova

Nederlands

Versie MDR1.0
01-2024



Parvum B.V.
Peppelkade 21
3992 AL Houten
+31 (0) 30 - 700 97 48
info@parvum.nl
www.parvum.nl



Obelis S.A.
Bld General Wahis 53
1030 Brussel



RALON MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Xilian Development Zone, Danzao, Nanhai, Foshan,
Guangdong, China