

# Montage

Quickramps kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden met Quicktape of Quickpads. Quickpads maken het mogelijk dat de ramps eenvoudig gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden, zodat eronder schoongemaakt kan worden.



## Meten met de RampOmeter

Het is belangrijk dat de ramp in de juiste hoogte besteld wordt. Het beste resultaat bereikt u door het gebruik van onze rampmeter, **die hier besteld kan worden.**



## Schoonmaak

Om de best mogelijke hechting van ofwel Quicktape of Quickpads te bereiken, moet u de ondergrond grondig reinigen.



## Gebruik van Quickpads

Monteer Quickpads vooraan de kleine pijltjes op de ramp.



## Verwijder de ramp, en zet hem weer terug

Bij het gebruik van Quickpads kan de ramp verwijderd, en weer teruggezet worden, zodat eronder schoongemaakt kan worden.



## Gebruik van Quicktape

Het beschermingspapier wordt van de voorgemonteerde tape verwijderd, en de ramp wordt stevig vastgedrukt op de gewenste plek.