

# Oorreiniger handleiding

## Gebruiksaanwijzing

Was de spuit voor gebruik met warm water en zeep goed uit en laat drogen. Herhaal dit altijd tussen de gebruiksmomenten door. Plaats de spuitkop op de bovenkant van de spuit en draai met de klok mee de spuitkop goed vast zodat deze stevig gemonteerd zit. Reinig de spuit met schoon water voor iedere keer dat U het product gebruikt. Om de spuit te vullen met lauw (handwarm) water, eerst de plunjer van de spuit helemaal indrukken zodat er geen lucht meer in zit. Vervolgens plaatst U de spuitkop in het water en trekt U de spuit vol water door de plunjer uit te trekken tot de spuit helemaal gevuld is.

## Schoonspuiten van de oren

Ga altijd zitten wanneer U uw oren gaat reinigen en houdt een kom of schaal onder uw oor. Het hoofd mag iets gekanteld worden richting het te reinigen oor. Zachtjes brengt U de spuitkop in uw oor. Druk nu langzaam op de plunjer van de spuit zodat er water uit de spuitkop komt en het oor gespoeld wordt. Herhaal deze stappen totdat het oor volledig gereinigd is. Na gebruik grondig de spuit en spuitkop reinigen.

### **LET OP!**

- Gebruik nooit koud of heet water om de oren te reinigen!
- Gebruik de spuit nooit om uw oren te reinigen als deze niet is voorzien van een spuitkop!
- Dit product bevat kleine onderdelen die tot verstikking kunnen leiden. Uit de buurt houden van kleine kinderen!
- Dit is geen medisch hulpmiddel

### **Niet gebruiken als:**

- Oorpijn of ontsteking aan het oor kanaal
- Uitslag heeft aan het oor
- Als U beschadigen heeft aan het trommelvlies
- Als U buisjes heeft
- Als U al bent geopereerd aan uw oren Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

\*Gebruik op eigen risico, Akbal E-Commerce is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door gebruik van dit product. Buiten bereik van kinderen houden.