

HeltiQ

Je échte eerste hulp

Vingerbob


HeltiQ Vingerbob is een compact gerolde bandage voor het snel en effectief fixeren van een verband of gaaskompres aan de vinger. Dit product is een medisch hulpmiddel.

- Snel verbinden van de vinger
- Voor bescherming van gaasje of verband
- Geen schaar benodigd

Hoe te gebruiken bij:

Snijwond

- 1 REINIGEN**
Reinig de snijwond met een wondreinigingsdoekje.
- 2 AFDEKKEN**
Dek de snijwond af met een HeltiQ Niet Verklevend Wondkompres. Of gebruik een HeltiQ Gaaskompres.
- 3 FIXEREN**
Fixeer het kompres met de vingerbob.

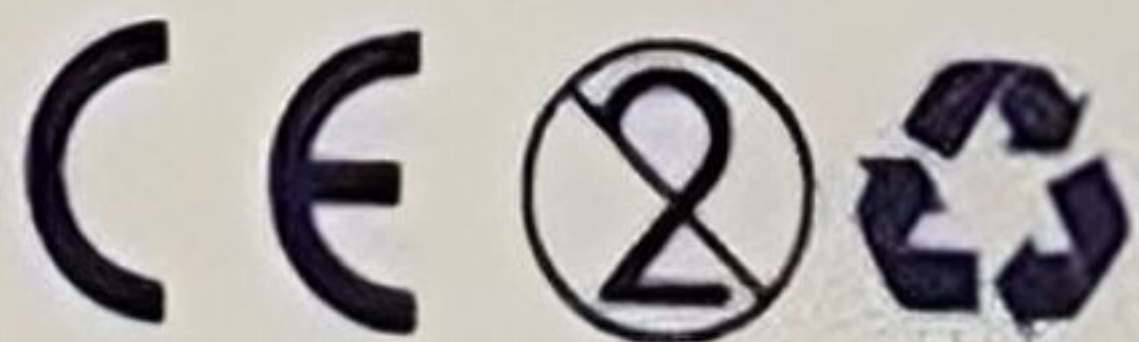


MD

Medical Device

Gebruiksaanwijzing



Stap 1
Plaats rolletje op vingertop.

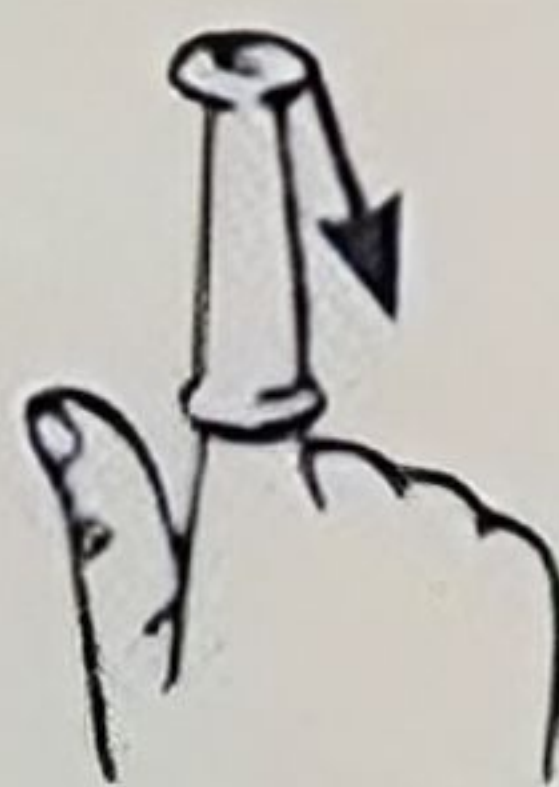

Stap 2
Ontrol het eerste rolletje volledig.



Stap 3
Draai om uiteinde af te sluiten.



Stap 4
Ontrol het tweede rolletje.