



Gefeliciteerd met uw aankoop!
Lees deze handleiding zorgvuldig.

Deze revolutionaire neusfilter van Woody Knows worden geproduceerd door het Amerikaanse M&M Pure Air Systems wat onder meer filterinstallaties levert aan grote Amerikaanse overheidsinstellingen en Fortune 500 bedrijven. De kennis die met het ontwikkelen van de filters is ontstaan, heeft geleid tot de ontwikkeling van dit neusfilter. Deze filters geven verlichting bij onder andere hooikoorts en allergieën.

De stof waarop gereageerd wordt komt nog maar beperkt door de neus het lichaam binnen waardoor er minder of geen medicijnen meer hoeft te worden gebruikt. Ook ideaal voor het werken in een stoffige omgeving (schilders, schoonmakers, metaalbewerkers, etc).

De Woody Knows neusfilter is een klein product wat u in uw neusgat plaatst.

- Lees de complete handleiding alvorens de neusfilters te gebruiken.
- Dit product is NIET geschikt voor personen t/m 14 jaar.
- Dit product is niet geschikt om (intensief) mee te sporten. Kijk uit dat u niet buiten adem raakt met de filter in. De filters kunnen niet nat worden omdat ze dan verzadigd raken en niet meer ademen.
- Laat het product niet onbeheerd achter binnen bereik van kleine kinderen.
- Gebruik GEEN beschadigde filters/houders. Het bruggetje tussen de neusgaten kan beschadigen door bijvoorbeeld nagels. Gebruik de filters/houders niet meer indien er scheurtjes/beschadigingen zijn. De houders zijn meerdere keren te gebruiken met nieuwe filters.
- Vervang de filters bijtijds.
 - Als ze zichtbaar niet meer schoon zijn.
 - Ze nat zijn geweest.
 - Ze meer weerstand geven, doordat de filter verzadigd raakt.
 - Ze meer dan 12 uur gebruikt zijn, of ouder zijn dan 3 dagen.
 - Dagelijks indien u extra gevoelig bent.
 - U krijgt hier vanzelf feeling mee.
- Indien u het filtertje nog een keer gaat gebruiken, laat de filter dan tussentijds na gebruik goed drogen in de open lucht. Zorg ook dat het bewaarbakje altijd droog en schoon is.
- Gebruik de neusfilter niet indien u slaapt en/of onder invloed bent en/of als u ligt.
- Gebruik het filter niet indien het uw ademhaling negatief beïnvloed, bijvoorbeeld door de weerstand die het filter geeft. Dit product is niet voor iedereen geschikt. U mag niet buiten adem raken door dit product.
- Dit product vermindert de stof die u binnenkrijgt via uw neus. Dit is afhankelijk van correct gebruik, aansluiting op de neus en staat van het filter. Dit product voorkomt niet dat er stoffen uw lichaam binnenkomt via uw mond of ruimte rondom het filter. Dit product geeft verlichting.
- De filters zelf kunnen NIET gereinigd worden.
- De kunststof behuizing van het filter kan worden gereinigd. Doe dit elke keer wanneer u het filter vervangt met lauw water en een mild reinigingsmiddel.
- Indien u onder behandeling bent van een arts, gebruik dit middel dan in overleg.

