


☎ 0031-85-902 02 66



HANDLEIDING SLIP VOET


STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG AANTREKKEN

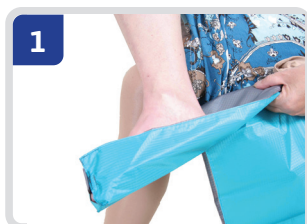

1

Steek uw voet in de punt van de slip

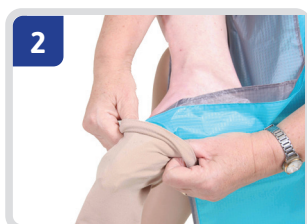

2

Trek uw kous over de voet aan, waarbij de slip onder de voet blijft



3

Trek uw kous helemaal aan over uw been, waarbij de slip langs de kuit blijft



4

Pak nu de buitenste (blauwe) slip vast aan de binnenkant van uw been



5

Trek nu de buitenste slip uit de kous en verdeel de kous verder over uw been

TIP

Gebruik speciale handschoenen en een anti-slip mat bij het aantrekken en uittrekken



Handschoenen
natuurrubber

art nr.
S 4010
M 4011
L 4012



Anti-slip mat
art nr. 3040

ZELFSTANDIG UITTREKKEN



Sla de slip om het onderbeen




Haal de slip door de lus en trek hem aan, waarbij de slip onder de hiel komt



Sla de kous over de slip naar beneden en trek de kous verder uit



Trek de kous over de hiel uit, waarbij de slip in de kous blijft zitten

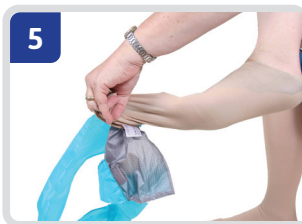

Trek de kous helemaal uit

Let op! Trek alleen aan de kous

KUNT U NIET MEER BIJ UW VOETEN?

Wij bieden ook onderstaande producten aan voor het aan-en uittrekken van steunkousen



Dressbuddy aan/uit art nr. 2001



Ort.O.Mate art nr. 3070

BESTELLEN?

sales@eritekbv.nl
of 0031-85-902 02 66

ALGEMENE INFORMATIE

WASSEN

Wassen op handwasprogramma, max 30°

CONTACT

Website
www.eritek.nl

MAIL
sales@eritekbv.nl

TELEFONISCH
Op werkdagen kunt u ons van 9:00 - 17:00 uur bereiken
op tel: 0031-85-902 02 66

“IK BEN WEER ZELFSTANDIG”

Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

