

# JUST COOL IT!

Effectieve behandeling van aambeiklachten



VEILIG TIJDENS DE  
ZWANGERSCHAP

VERZACHTING  
BIJ INFECTIE

STOPT HET  
BLOEDEN

REDUCEERT OF STOPT  
DE ANUS JEUK

BIEDT DIRECT  
VERLICHTING BIJ PIJN

HEMORCOOL®

klinisch bewezen werkend medisch hulpmiddel bij aambeiklachten

# Wat zijn aambeien?

Ongeveer 2-4 cm. boven de anusopening bevindt zich een aantal zwellingen, die tezamen met de kringspier winden en ontlasting tegenhouden. Als men een wind moet laten en aandrang voelt om te ontlasten, krimpen de zwellichamen en gaat de sluitspier open, zodat een wind of de ontlasting naar buiten kan. Zonder deze zwellichamen zou een mens zijn winden en dunne ontlasting niet op kunnen houden. Dit fijne werk kunnen de sluitspiers niet alleen doen. Daar zijn de zwellichamen voor nodig. Als de zwellichamen veel groter worden dan nodig is en deze door hard persen bij het ontlasten ook nog eens naar beneden worden geduwd en soms zelfs uit de anus hangen en bloeden, spreekt men van aambeien. Kort samengevat zijn aambeien veel te groot geworden zwellichamen. Waardoor zwellichamen ontaarden in aambeien, is niet bekend. Als oorzaken worden o.a. genoemd: bindweefselzwakte, alcohol, overgewicht, hoesten, overdreven laxeer-middel gebruik.

## Welke klachten kunnen aambeien geven?

De meest gehoorde klacht is bloedverlies. De patiënt verliest helderrood bloed bij of ná de stoelgang. Een andere klacht is jeuk. Jeuk ontstaat doordat de aambeien vol bloed worden gerperst. Een derde klacht is dat de

patiënt het gevoel heeft dat er iets in de endeldarm zit dat aanvoelt als een zwelling of ontlasting die er niet uit wil. Dat gevoel ontstaat, doordat er grote aambeien zijn, die bovendien vol met bloed zijn gestuwd. Deze aambeien geven het gevoel van te moeten ontlasten en het toch niet te kunnen. Door grote aambeien kan de ontlasting soms ook moeilijk uit de endeldarm komen. Persen bij de ontlasting heeft in dergelijke gevallen dan ook geen enkel resultaat. Als men het toch doet, komen op de lange duur de aambeien buiten de anus te hangen.

Omdat de oorzaak van anale klachten meestal binnen in de endeldarm ligt, waar ook aambeien zich bevinden, is het logisch dat men naar een middel heeft gezocht dat kou op de juiste plaats - dus 2-4 cm diep - kan inbrengen. Dat kan nu met behulp van de Hemorcool®. Door de inwerking van de kou krimpen de bloedvaten van de aambeien in de endeldarm, waardoor een bestaande ontsteking afkoelt en minder pijnlijk wordt. Hierdoor zal het bloeden ophouden of sterk verminderen. Evenals jeuk en afscheiding.

# De Hemorcool®

## De behandeling van aambeiklachten

De Hemorcool® is een koelstick, ter behandeling van aambeiklachten. Deze Hemorcool® is gevuld met een uitgekiend koelmiddel. Het is zo geconstrueerd, dat het gemakkelijk in de anus is in te brengen. Het kan niet in zijn geheel in de darm komen, omdat het dikke einde dat verhindert. De Hemorcool® is gemaakt van onbreekbaar kunststof. Let wel: de Hemorcool® niet beschadigen, door deze bijvoorbeeld te laten vallen. De lasnaad mag niet worden geopend, want daarvoor wordt de Hemorcool® onbruikbaar. De Hemorcool® is nieuw in Nederland en België. In Amerika, Canada en Frankrijk wordt hij al vanaf 1973 toegepast. Met veel succes, zoals blijkt uit de wetenschappelijke berichtgeving van onderzoekers. Ze vermelden meer dan 90% goede resultaten te hebben gehad met deze anale koelstaaf.



STOPT HET  
BLOEDEN



REDUCEERT OF  
STOPT DE ANUS  
JEUK



BIEDT DIRECT  
VERLICHTING BIJ  
PIJN



VERZACHTING BIJ  
INFECTIE

## Hoe werkt de Hemorcool®?

In de geneeskunde wordt pijn vaak bestreden door kou.

Bekende voorbeelden hiervan zijn:

- het leggen van een “koud” washandje op het voorhoofd tegen hoofdpijn en koorts
- het inpakken van een verstuite enkel met ijsblokjes
- het leggen van ijsblokjes op een insectenbeet of steek
- een zakje ijsblokjes op bijvoorbeeld een anustrombose.



CE

# Gebruik Hemorcool®

## Wanneer gebruikt u de Hemorcool®

Bij klachten kunt u de Hemorcool® gebruiken. Indien gewenst kan de Hemorcool® meerdere malen per dag gebruikt worden. Bij ernstige klachten geeft de Hemorcool® na herhaald gebruik langdurig verlichting en kunnen de klachten helemaal verdwijnen. Het instructiefilmpje kunt u vinden op ons YouTube kanaal, kijk op: **Pita Medical - Hemorcool®**

## In welke gevallen gebruikt u de Hemorcool®?

U kunt de Hemorcool® gebruiken om:

- het bloeden van aambeien snel te laten stoppen
- de anusjeuk af te laten nemen of te laten ophouden
- de anuspijn te bestrijden
- de ontsteking te laten verminderen

**Instructie filmpje van de Hemorcool® op Youtube.**



1. Hemorcool® is een medisch hulpmiddel gebaseerd op Cryotherapie.
2. Kan gewoon tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
3. Veiligheid, goedkope en effectieve behandeling van aambeien
4. Hemorcool® voldoet als medisch hulpmiddel aan de Richtlijn
5. 93/42/EEG van de Europese Commissie.



# Voordelen van de Hemorcool®

De Hemorcool® werkt volgens het koelprincipe. Er komen dus geen medicijnen in de darm. Veel patiënten reageren nauwelijks op aambeizalven en zetpillen. De Hemorcool® kan gewoon worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Voor verdere instructies over het gebruik zie de gebruiksaanwijzing.



2 uur

Voor gebruik  
2 uur in het  
vrievak



Meerdere keren  
per dag te ge-  
bruiken

Advies:



Te vervangen na  
9 maanden  
1e gebruik




Persoonlijk  
gebruik



Veilig te  
gebruiken tijdens  
de zwangerschap

# Gebruiksaanwijzing

1. Leg de Hemorcool® minstens 2 uur in het vriesvak van de koelkast.
2. Haal de Hemorcool® uit het vriesvak, breng wat vaseline aan op de Hemorcool® en rond de anus.
3. Ga op de zij liggen en breng de Hemorcool® meteen anaal in tot aan de verbreding.
4. Blijf ongeveer 6 tot 10 minuten op de zij liggen.
5. Haal de Hemorcool® uit de anus en reinig deze met water en zeep.
6. Plaats de Hemorcool® in de opbergbox en leg deze voor minstens 2 uur in het vriesvak van de koelkast. daarna is de stick weer klaar voor gebruik.

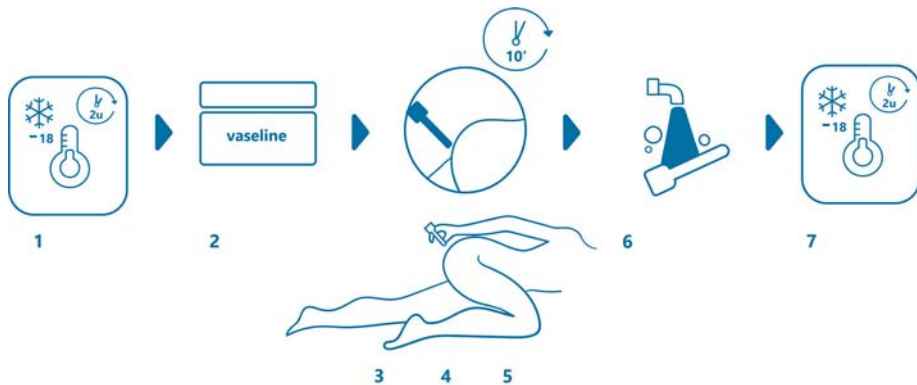

LATEX VRIJ

NIET STERIEL

# Veelgestelde vragen

## **Kan de Hemorcool® kwaad?**

Nee, van de Hemorcool® zijn geen negatieve bijwerkingen of complicaties bekend. Wel moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden.

## **Kan de Hemorcool® kapot?**

Nee, bij normaal gebruik kan deze niet kapot. Indien de Hemorcool® toch kapot gaat, doordat er bijvoorbeeld op gestaan is, dan dient u geen gebruik meer te maken van de stick, de Hemorcool® bevat geen gevaarlijke stoffen en is vervaardigd uit hoogwaardige kunststof materialen.

## **Hoe lang blijft de Hemorcool® koud?**

De Hemorcool® blijft ca. 10 minuten koud nadat u het uit de vriezer heeft gehaald, deze is dan ook gelijk klaar om te gebruiken. In de verpakking bijgeleverd vindt u vaseline, of gebruik de Hemorcool crème, doe hiervan wat op de Hemorcool® en rondom de anus, zodat de Hemorcool® makkelijk naar binnen glijdt. Probeer u zich zoveel mogelijk te ontspannen tijdens het naar binnen brengen van de Hemorcool®. Het inbrengen van de Hemorcool® doet geen pijn.

## **Hoe vaak kan ik de Hemorcool® gebruiken?**

De Hemorcool® kan meerdere malen per dag worden gebruikt.  
Bij klachten raden wij dit zelfs aan.

Bij langdurig aanhoudende klachten is het raadzaam uw arts te raadplegen.

## **Schoonmaken van de Hemorcool®?**

Na gebruik dient u de Hemorcool® alleen met water en zeep af te spoelen. U kunt de stick daarna terugstoppen in de meegeleverde, daarvoor bestemde, koker en direct in het vriesvak of diepvries leggen. Na 2 uur is de stick dan weer klaar voor gebruik. Wij ontraden het steriliseren of uitkoken van de Hemorcool®, deze kan hierdoor kapot gaan.

## **Heeft de Hemorcool® een houdbaarheidsdatum?**

Wij adviseren de Hemorcool® niet langer dan 9 maanden na aanschaf te gebruiken.

## **Is de Hemorcool® veilig tijdens de zwangerschap?**

Jazeker, de Hemorcool® is volledig veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap en bevat geen enkele chemische stof. Kent geen bijwerkingen voor moeder en ongeboren baby.

## **Wat is de bewaartemperatuur van de Hemorcool® stick?**

Voor het optimale resultaat dient de stick bewaard te worden bij een minimale temperatuur van minus  $-18^{\circ}$   
Standaard staat uw vriezer of vriesvak ingesteld op deze temperatuur.



**VEILIG TIJDENS DE  
ZWANGERSCHAP**

**VERZACHTING  
BIJ INFECTIE**

**STOPT HET  
BLOEDEN**

**REDUCEERT OF STOPT  
DE ANUS JEUK**

**BIEDT DIRECT  
VERLICHTING BIJ PIJN**





PITA MEDICAL  
**HEMORCOOL**<sup>®</sup>  
AAMBEIENCRÈME



VOORKOMT  
INFECTIES

VERLICHT  
DE JEUK

VERZACHT  
DE PIJN

BACTERIEDODENDE  
WERKING

**ANTIBACTERIEEL**

Infectiewerend

# De kracht van koper

Koper op de huid vernietigt schimmels, bacteriën en virussen en maakt dat er geen infectieziekten van de huid optreden. Het gebruik van koper op de huid leidt bovendien maar zelden tot overgevoeligheid. Sterker nog: de mens heeft koper nodig. De dagelijks aanbevolen behoefte aan koper is 3 mg. Dit halen we uit groenten, bonen, avocado, pruimen en verschillende soorten vis. Een tekort aan koper kan leiden tot onder meer bloedarmoede, botontkalking, een laag aantal witte bloedlichaampjes, onregelmatige hartslag, spataderen en vergroot de kans op infectie.


## Wetenschappelijk bewezen

Al in de oudheid was bekend dat koper gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft. 2000 jaar voor Christus werd in het oude Egypte koper gebruikt om water te steriliseren en wonden te behandelen. En in de boeken van de Griekse arts Hippocrates (460-380 jaar voor Christus) wordt koper geadviseerd voor de behandeling van beenwonden bij spataderen.

Ook recent onderzoek onderschrijft de bijzondere werking van koper. Zo bleek na een studie in 2015 dat bij vrouwen met een koperspiraal na een jaar significant minder vaak het aan baarmoederhalskanker gerelateerde HPV-virus aanwezig was dan bij vrouwen met een spiraal zonder koper. Uit ander onderzoek blijkt dat het gebruik van koperhoudende geïmpregneerde gazen na een knip bij bevallingen en bij voetwonden van diabetici, maakt dat wonden sneller genezen. Ook Saxion University of Applied Sciences doet onderzoek naar de bacteriedodende werking van koper, waarbij bamboe en katoen geïmpregneerd met koper worden blootgesteld aan bacteriekolonies. Het aantal bacteriën neemt hierdoor af.

Ook de toepassing van koper in een crème is wetenschappelijk bewezen. Zo blijkt uit onderzoek dat koper- en zinkhoudend bakkersgist, wat al meer dan zestig jaar wordt gebruikt voor de behandeling van onder andere aambeien, inderdaad een medicinale werking heeft.



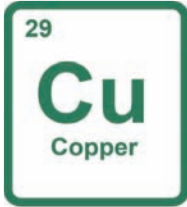

# Hemorcool® crème

Met de kracht van koper en zink

De Hemorcool® crème is de eerste crème ter behandeling van aambeïklachten die koper en zink bevat. Hierdoor verzacht de crème niet alleen bij jeuk en pijn, maar is deze ook bewezen effectief bij infecties. De crème is ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. Omdat de Hemorcool® crème geen toxische ingrediënten bevat, kan deze ook veilig gebruikt worden door zwangere vrouwen. De Hemorcool® crème zit in een compacte en gemakkelijk mee te nemen dispenser die een hygiënisch gebruik garandeert, waar u ook bent. Gebruik de crème voor een optimaal resultaat in combinatie met de Hemorcool® koelstick.



## De kracht van koper

De Hemorcool® crème onderscheidt zich door de toevoeging van koper: een krachtig geneeskundig bestandsdeel.

- Het is wetenschappelijk bewezen dat koper op de huid schimmels, bacteriën en virussen vernietigt en maakt dat er geen infectieziekten van de huid optreden.
- Het gebruik van koper op de huid leidt maar zelden tot overgevoeligheid. Sterker nog: de mens heeft dagelijks 3 mg koper nodig.
- Al in de oudheid was bekend dat koper gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft. Zowel de oude Egyptenaren als de oude Grieken gebruikten koper om wonden te behandelen.
- Ook diverse recente onderzoeken onderschrijven de werking van koper.

## Gebruik Hemorcool® crème

### Wanneer gebruikt u de Hemorcool® crème?

De Hemorcool® crème is geschikt voor de behandeling van aambeïklachten. De crème biedt verlichting en gaat infectie tegen. Wij adviseren de Hemorcool® crème twee- tot driemaal per dag aan te brengen rond de anus. Daarnaast kunt u de crème extra gebruiken wanneer u tussentijds klachten ervaart. Door de handige dispenser is de crème hygiënisch in gebruik en gemakkelijk mee te nemen, zodat u altijd en overal over een middel beschikt om uw klachten te verlichten. Voor een optimaal resultaat gebruikt u de crème in combinatie met de Hemorcool® koelstick.




Donker en koel  
bewaren



Meerdere  
keren per dag te  
gebruiken



6 maanden  
houdbaar na  
openen

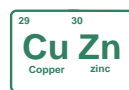

Bevat  
koper en zink



Veilig te  
gebruiken tijdens  
de zwangerschap

# Hemorcool® crème

## In welke gevallen gebruikt u de Hemorcool® crème?

U kunt de Hemorcool® crème gebruiken om:

- De anusjeuk te verminderen of stoppen
  - De anuspijn te bestrijden
  - Bacteriegroei tegen te gaan
  - Ontsteking te laten verminderen
1. Hemorcool® crème bevat koper en zink
  2. De crème kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt
  3. Voor een veilige, goedkope en effectieve behandeling van aambeien
  4. Handige compacte dispenser voor een hygiënisch gebruik, waar u ook bent
  5. Is zonder recept verkrijgbaar via apotheek, drogist en diverse online verkoopkanalen

## Voordelen van de Hemorcool® crème

De Hemorcool® crème is de enige crème voor de behandeling van aambeien die koper en zink bevat. In aanvulling op vergelijkbare producten heeft de crème hierdoor een bacteriedodende werking en voorkomt deze infecties. De Hemorcool® crème kan ook worden gebruikt tijdens de zwangerschap. De handige dispenser is hygiënisch in gebruik en door het compacte formaat eenvoudig mee te nemen.

## Het gebruik van de Hemorcool crème

1. Reinig uw handen voor en na het gebruik met water en zeep



2. Breng de crème aan rond de anus (de Hemorcool® crème is niet bedoeld voor inwendig gebruik)



3. Bij gebruik in combinatie met de Hemorcool® stick kunt u de crème rondom de anus aanbrengen

4. Herhaal twee tot driemaal per dag en bij acute klachten



# Veelgestelde vragen

## **Kan het gebruik van de Hemorcool® crème kwaad?**

Nee, er zijn geen negatieve bijwerkingen of complicaties bekend van het gebruik van de Hemorcool® crème. Wel moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden.

## **Hoe vaak kan ik de Hemorcool® crème gebruiken?**

We raden aan de Hemorcool® crème twee tot drie keer per dag te gebruiken. Daarnaast kunt u de crème extra gebruiken ter verlichting van acute klachten. Bij langdurig aanhoudende klachten is het raadzaam om uw arts te raadplegen.

## **Hoe lang is de Hemorcool® crème houdbaar?**

De Hemorcool® crème is 2 jaar houdbaar. Na openen is de crème tenminste 6 maanden houdbaar.

## **Hoe lang doe ik met 1 dispenser?**

Met de 30ml. dispenser, bij een dagelijks gebruik van 1 x p/dag aanbrengen: ca. 3 maanden.

Met de 50 ml. dispenser, bij een dagelijks gebruik van 1 x p/dag aanbrengen: ca. 5 maanden.

## **Is de Hemorcool® crème veilig tijdens de zwangerschap?**

Ja, de Hemorcool® crème is volledig veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap en

bevat geen schadelijke stoffen. Ook zijn er geen bijwerkingen van het gebruik voor moeder en kind.

## **Wat maakt de Hemorcool® crème anders dan andere zalven ter behandeling van aambeiklachten?**

De Hemorcool® crème bevat koper. Deze stof gaat infecties en bacteriegroei tegen.

## **Waarom zou ik een crème met koper kiezen?**

Wanneer u aambeien heeft, is de kans aanwezig dat hier scheurtjes in ontstaan. Hierbij is er een hoog risico op infecties, aangezien deze wondjes gemakkelijk in contact komen met bacteriën in ontlasting. Koper heeft een bacteriedodende werking, waardoor u dit risico verkleint.

## **Hoe gebruik ik de Hemorcool® crème in combinatie met de koelstick?**

U kunt de twee producten in dezelfde periode los van elkaar gebruiken. De crème is door de handzame verpakking ook eenvoudig mee te nemen en te gebruiken wanneer u onderweg bent en de Hemorcool® stick niet bij zich heeft. Het is ook mogelijk om de producten samen te gebruiken. U smeert dan de crème rondom de anus voordat u de Hemorcool® gebruikt. Het gebruik van ander glijmiddel is dan niet nodig.

VEGAN

CRUELTY FREE

PITA MEDICAL  
**HEMORCOOL**<sup>®</sup>  
AAMBEIENCRÈME

**Blijf niet onnodig met klachten lopen!**

Onze Hemorcool<sup>®</sup> producten zijn online verkrijgbaar.



**Voor vragen over onze producten:**

Pita Medical B.V.

[info@pitamedical.com](mailto:info@pitamedical.com)

[www.pitamedical.com](http://www.pitamedical.com)

Tel: 06 27 25 44 97