



VS216CL
Commode-voeringen
met superabsorberende pads



**Emmer niet
Inbegrepen**

Bevestigings- en onderhoudsinstructies

Dit bestand kan als PDF worden bekeken en gedownload op www.aidapt.co.uk. Klanten met een visuele beperking kunnen een gratis PDF Reader (zoals adobe.com/reader) gebruiken om in te zoomen en de tekstgrootte te vergroten voor een betere leesbaarheid.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor correct gebruik en bewaar een exemplaar voor toekomstig gebruik.

De Aidapt toiletvoering met absorberende pads is gemaakt van lekbestendig materiaal van medische kwaliteit en bevat een uniek superabsorberend kussen dat tot 16 oz lichaamsvloeistoffen in enkele seconden in een gel verandert. De toiletvoering past over de meeste toiletlemmers. Deze toiletvoering voor eenmalig gebruik met absorberende pads helpt de aanwezigheid van ontlasting- en urinegeuren te elimineren. Ze bevatten ook bevestigde riemen die u kunt sluiten en vervolgens kunt vastbinden voor efficiënt opruimen. Ze beschikken ook over biologisch afbreekbare technologie waardoor ze veilig zijn voor het milieu. De Aidapt commode-liner met absorberend kussen is verkrijgbaar in een handige doos van 50 stuks.

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Plaats de liner in de toiletlemmer en trek aan de touwtjes om hem vanaf de onderkant vast te zetten.



2. Plaats het superabsorberende kussentje in het midden van de toiletlemmer. Na gebruik veranderen lichaamsvloeistoffen in een gel, waardoor spatten en morsen worden voorkomen. Absorbeert tot 450 ml/16 fl oz lichaamsvloeistoffen of 1000 ml gedestilleerd water



3. Trek na gebruik de trekkoorden samen en leg een knoop rond de opening om de voering af te dichten.



4. Gooi de liner na gebruik weg in de afvalbak.

5. Voer afval op de juiste manier af. Spoel het absorberende kussentje niet door in het toilet om verstopping van het systeem te voorkomen.

DIMENSIES

Tas540x400mm
Pad240x130mm

KLEUR

Tas Wit met blauw trekkoord
Pad Wit

VOORDELEN

1. Helpt personeel en patiënten te beschermen
2. Vermindert het contact met lichaamsafval en vangt ongewenste geuren op
3. Voorkomt morsen en spatten
4. Vermindert schoonmaakklusjes
5. Bespaart tijd
6. Vermindert stress
7. Biologisch afbreekbaar
8. Niet-steriel

WAARSCHUWING

Plastic zak veroorzaakt verstikking, buiten het bereik van kinderen houden. Op de juiste manier weggooien, of in geval van infectie, in biologisch gevaarlijk afval.

Uit de buurt houden van vlammen/extreme hitte - zal branden bij blootstelling aan vlammen.

De voering heeft een lange houdbaarheid, op voorwaarde dat de zak zich in een goede, koele opslagconditie bevindt en niet uit de doos wordt geopend, omdat het EPI (biologisch afbreekbaar middel) zuurstof, UV-licht en warmte nodig heeft om af te breken.

Na gebruik wordt het plastic afgebroken onder invloed van zuurstof, hitte en/of zonlicht, dit proces duurt ongeveer 180 dagen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Commode-voeringLDPE (trekkoord HDPE)
Absorberend kussen..... Super Absorberend polymeer (SAP), weefsel, nieuwe houtpulp
..... Absorptievermogen 450 ml 0,9% zoutoplossing 35°C of 1000 ml gedestilleerd water

BELANGRIJKE GEGEVENS

De informatie in dit instructieboekje mag niet worden opgevat als onderdeel van of als vaststelling van enige contractuele of andere verbintenis door Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd of haar agenten of dochterondernemingen en er wordt geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de informatie.

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; als gebruiker moet u de aansprakelijkheid aanvaarden voor de veiligheid bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage/het gebruik van uw product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telefoon: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.com
E-mail: sales@aidapt.co.uk