



jouw eerste hulp

# Eilandpleister Watervast

HeltiQ Eilandpleister Watervast biedt een optimale bescherming voor medium en grote wonden onder de douche na bijvoorbeeld een operatieve ingreep. Door de ultradunne en elastische kleefrand rondom het wondkussen komt er geen water bij de wond tijdens het douchen. Dit product is een medisch hulpmiddel.

- Ultradunne en elastische kleefrand
- Hecht niet aan de wond
- Per stuk steriel verpakt

### Let op!

Breng na gebruik van de eilandpleister watervast onder de douche, een gewone HeltiQ Eilandpleister aan. Vervang de eilandpleister regelmatig.

### Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder de papieren bescherm laag waardoor de kleeflaag vrijkomt.
2. Houd de eilandpleister watervast boven de wond en breng het folie aan. Druk de eilandpleister watervast stevig aan om deze goed aan de huid te laten hechten.
3. Verwijder tenslotte het transparante schutvel aan de bovenzijde van de folie vanuit de split in het midden.

### Bewaaradvies

Koel en droog bewaren. Houd de eilandpleisters uit de zon.

LOT HLA2304662

2028-07-15

2023-07-15



### Hoe te gebruiken bij:

#### Snijwond

##### 1 REINIGEN

Spoel de snijwond schoon met HeltiQ Wond & Oog Spray. Dep droog met een steriel gaaskompres.

##### 2 AFDEKKEN

Staan de wondranden uit elkaar? Breng ze dan samen door de HeltiQ Wondhechtstrips te gebruiken. Dek voor het douchen de snijwond af met de eilandpleister watervast. Vervang na het douchen de eilandpleister watervast door een gewone HeltiQ Eilandpleister.

#### Schaafwond

##### 1 REINIGEN

Spoel de schaafwond schoon met HeltiQ Wond & Oog Spray. Dep droog met een steriel gaaskompres. Maak de huid rondom de schaafwond schoon met een HeltiQ Reinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

##### 2 AFDEKKEN

Dek de schaafwond voor het douchen af met de eilandpleister watervast. Plaats na het douchen een gewone HeltiQ Eilandpleister.

#### Operatiewond

##### 1 REINIGEN

Reinig de huid rondom de operatiewond met een HeltiQ Reinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

##### 2 AFDEKKEN

Dek voor het douchen de operatiewond af met de eilandpleister watervast. Vervang na het douchen de eilandpleister watervast door een gewone HeltiQ Eilandpleister.

**EN**  
Absorbent adhesive dressing waterproof

For use in the shower to protect medium and large cuts and scrapes or surgical wounds

**FR**

Pansement couvrant adhésif imperméable

À utiliser sous la douche pour protéger les blessures moyennes et grandes telles que coupures, éraflures ou opératives.

**Wondverband Wasserdicht**

Zorgvuldige verzorging van de wond is van belang om te voorkomen dat de wond infectie krijgt. Het gebruik van een wondverband kan de wond beschermen tegen bacteriën en andere schadelijke organismen. Het wondverband moet goed aan de huid kleven en de wond moet goed droog zijn. Het wondverband moet regelmatig worden vervangen.



Scan de code voor meer informatie over het gebruik van dit product.

Importeur:  
Koninklijke Utermöhlen NV  
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega, Nederland  
www.heltiq.nl

Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd.  
No.55 Yuejin Road, Zouqu Town 213144 Changzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

REF 1200217  
554014  
V12.20220217



STERILE EO