

PROBE WAARSCHUWINGEN

Let op: Deze probe is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één patiënt. Deel uw probe niet met iemand anders. Onjuiste behandeling of kruisbesmetting kan optreden.

Let op: Het is belangrijk dat de probe voor en na elk gebruik wordt gereinigd. Ondoelmatig reinigen kan leiden tot irritatie of infectie.

Let op: Plaats of verwijder de probe nooit tenzij de besturingseenheid is uitgeschakeld omdat het inbrengen of verwijderen terwijl de stimulatie actief is, ongemak of weefselirritatie kan veroorzaken.

Let op: Stop de behandeling onmiddellijk als weefselirritatie optreedt. Vraag uw arts om advies voordat u de behandeling voortzet om letsel te voorkomen.

Let op: Gebruik geen glijmiddel op siliconenbasis op de metalen platen van de probe omdat dit de effectiviteit van de elektrische stimulatie kan verminderen.

Let op: Het roestvrij staal in de metalen platen van de probe bevat wat nikkel.

Dit kan een reactie veroorzaken bij een nikkelallergie. Er is een alternatieve gouden probe-- beschikbaar die speciaal gemaakt is zonder nikkel (zie X-VPG).

Let op: Het oppervlak van de elektrode is 8.08 cm². Bij hoge uitgangsinstellingen op sommige apparaten kan dit resulteren in een stroomdichtheid van meer dan 2mA RMS/cm². Een hoge stroomdichtheid kan gepaard gaan met plaatselijke weefselbeschadiging of kleine niet-thermische brandwonden. Verhoog de intensiteit voorzichtig en verlaag de intensiteit als u scherpe pijn ervaart tijdens het gebruik of bij ontlading of bloeding na gebruik.

Let op: Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is.



Waarschuwingen

Dompel de probe niet onder in een vloeistof.

Houd het apparaat uit de buurt van pluisjes en stof, want langdurige blootstelling aan pluisjes of stof kan de aansluiting aantasten.

Houd het apparaat uit de buurt van zonlicht, omdat langdurige blootstelling aan zonlicht het rubber kan aantasten, waardoor het minder elastisch wordt en kan barsten.

Uit de buurt houden van kinderen jonger dan 5 jaar. Lange kabel - risico op wurging bij kinderen.

VERWIJDERING

Grondig reinigen en afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.

REINIGEN

Het is belangrijk dat de probe voor en na elk gebruik wordt schoongemaakt. Reinig met een antibacterieel doekje zonder alcohol of met een doekje bevochtigd met warm zeepwater. Afspoelen onder stromend water, goed afdrogen en het apparaat terugplaatsen in het opbergzakje.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal: Elektrode lichaam: Plastic ABS PA-757

Elektroden: Roestvrij staal #304

Kabels: PVC over koperen spoelgeleider


Levensduur in gebruik: 6 maanden



Dit symbool op het apparaat betekent "Volg de gebruiksaanwijzing".

Neem voor het melden van onverwachte handelingen of gebeurtenissen contact op met Tenscare Ltd op het onderstaande adres

Neem voor het melden van onverwachte handelingen of gebeurtenissen contact op met Tenscare Ltd op het onderstaande adres

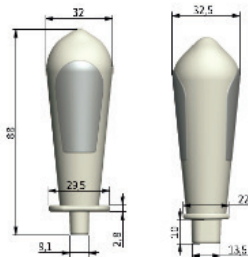

 Probe
Liberty +

REF X-VPM

Vaginale probe voor een elektrotherapie
unit



INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Aandachtig lezen voor gebruik

TensCare

INDICATIES VOOR GEBRUIK

De **Liberty** probe is speciaal ontworpen voor uw lichaam. Dankzij de kleine afmetingen, de gladde buitenkant en de gebogen randen is hij gemakkelijk in te brengen en comfortabel in gebruik.

De probe heeft een gebogen punt voor gemakkelijk inbrengen, en positioneringsring een aan de basis voor gemakkelijk verwijderen.

Alleen voor gebruik met Spierstimulatie en EMG Biofeedback apparatuur goedgekeurd volgens EN 60601-1 bij de behandeling van Stress-, aandrang- en gemengde urine-incontinentie en bekkenpijn.

Voor vrouwen: De **Liberty Probe** is bedoeld voor de behandeling van stress-, aandrang- en gemengde urine-incontinentie en bekkenpijn. Bovendien kan het helpen de seksuele intimiteit te verbeteren door de bekkenbodemspieren te versterken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Reinig de probe met een alcoholvrij antibacterieel doekje of met warm zeepwater. Afspoelen onder stromend water en goed afdrogen.
2. Sluit de kabel van de basis van het apparaat aan op de kabel in de probe. Duw de pennen stevig in de pigtail-uiteinden van het probedraad.
3. Voordat u de probe gebruikt, moet u naar het toilet.
4. Smeer de metalen elektrodeoppervlakken en de probepunt in met een glijmiddel op waterbasis, zoals TensCare Go Gel of water.



Let op: Gebruik geen glijmiddel op siliconenbasis op de stimulatiecontacten, omdat dit de effectiviteit van de spierstimulatie kan verminderen.

5. Kies een comfortabele houding, bijvoorbeeld liggend op uw bed op uw zij met uw knieën opgetrokken.



Waarschuwing: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de probe plaatst.

6. **Vaginale positionering:** Nadat de draad stevig is aangesloten, brengt u de probe in uw vagina in, op dezelfde manier als een tampon, totdat alleen de plastic ring aan de basis van de probe zichtbaar is. De metalen delen geleiden de elektrische puls en moeten steeds in contact zijn met het hoofddeel van de spier. De weefsels dicht bij de ingang zijn gevoeliger, dus die moet u niet stimuleren. Probes met lange elektroden (het metalen deel) die op en neer lopen over de lengte van het hulpstuk moeten altijd worden ingebracht met de metalen delen heup aan heup gericht.
7. Schakel na de training de besturing uit en verwijder de probe door de rand van de positioneringsring vast te houden en voorzichtig naar buiten te trekken.

Gedistribueerd door:

Ydona B.V.

Ydona.

www.ydona.nl



TensCare Ltd

9 Blenheim Road, Epsom,
Surrey, KT19 9BE, UK
Tel: +44(0) 1372 723434
www.tenscare.co.uk

EC REP

Advena Ltd



TensCare Europe BV

Juliana van Stolbergstraat 52
1723LD Noord-Scharwoude
Netherlands



Pub No.: I-VPM-NL Rev 1.0 03/23

TensCare™