



Met extra glijmiddel op basis van silliconen.
Mit extra Gleitmittel auf Silikonbasis.



FINESSE/DIKTE/FEINHEIT

Épals/Dik/Dick



LATEX

Préservatif transparent en latex de caoutchouc naturel.
Transparant latex condoom van natuurlijk rubber.
Transparente Kondome aus Naturkautschuklatex.



ODEUR AGRÉABLE/AANGENAME GEUR/ANGENEHMER DUFT

Notre procédé de fabrication des préservatifs Durex leur permet d'avoir une odeur agréable./Dankzij het productieproces hebben onze Durex-condooms een aangename geur./Das Herstellungsverfahren von Durex Kondomen sorgt für ihren angenehmen Geruch.

**TROUVE LA TAILLE QUI TE CONVIENT
VIND DE BESTE PASVORM
FINDE DEINE RICHTIGE PASSFORM**



www.durex.fr
www.durex.be
www.durex.nl



**AVANT L'UTILISATION, VOIR LE MANUEL DE GENE D'AVANT,
BEVOR DU LOSLEGST**

Utilisez uniquement les lubrifiants compatibles avec les préservatifs.
Pour un usage anal, il est recommandé d'ajouter du lubrifiant (ne pas utiliser Durex Tingle, Durex Cosmic Desire ou Durex Lovers Connect pour un rapport anal). Le lubrifiant s'applique toujours sur l'extérieur du préservatif. / Gebruik alleen glijmiddel dat wordt aanbevolen voor gebruik met condooms. Bij anaal gebruik wordt een glijmiddel aanbevolen op de buitenkant van het condoom (geen Durex Tingle). / Verwende nur kondomverträgliches Gleitgel. Für Analsex empfehlen wir Gleitgel auf die Außenseite des Kondoms aufzutragen (kein Durex Tingle).



TRI/AFVALSORTERING/ENTSORGUNG

Cet emballage est recyclable mais pas son contenu. N'utilisez un préservatif qu'une seule fois. Jetez le préservatif et son emballage dans une poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes. / Deze verpakking is recycleerbaar, maar de inhoud niet. Gebruik een condoom maar één keer.

Gooi het condoom en de verpakking in een vuilnisbak en niet in het toilet. / Diese Verpackung ist recycelbar, aber nicht ihr Inhalt. Benutze jedes Kondom nur einmal. Wirf das benutzte Kondom und seine Verpackung in den Mülleimer, nicht ins WC.

MEER ALS 90 JAARE RICHTIGER SAK -
das ist doch mal eine langfristige Beziehung.



Pour trouver le bon sens du premier coup, mettre le logo Durex vers le pénis et enfiler le préservatif.

Om het condoom de eerste keer in de juiste richting te openen, moet je ervoor zorgen dat het Durex-logo zich in de richting van de penis bevindt.


*Basé sur les ventes. Plus d'informations sur / *Gebaseerd op verkoop. Meer informatie op / *Auf der Basis von Verkaufszahlen. Weitere Informationen auf durex.fr / durex.be / durex.nl

50033484



À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Op een droge en koele plaats bewaren.
Kühl und trocken aufbewahren.

ISO 4074

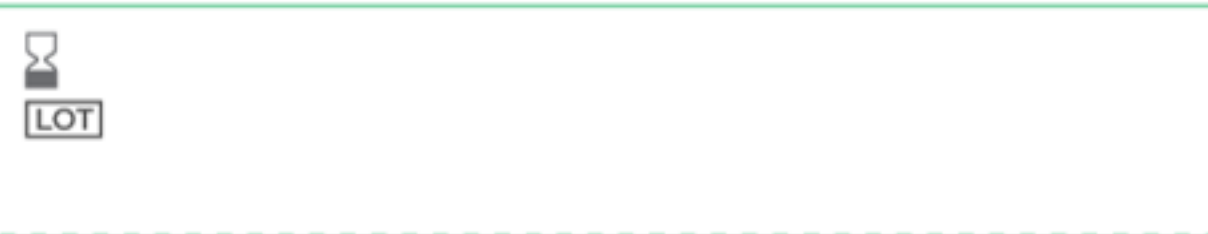

Service consommateurs France: +33(0) 1 69 93 19 50
Consumentendienst Nederland: 0031 (0)23 558 45 01
Consumentendienst België/Service consommateurs Belgique: 0032 (0)2 456 99 61

Certifié par SGS Belgique NV selon DDM 93/42/CEE, CE 1639 pour la contraception ou la prévention de la transmission des infections sexuellement transmissibles. Toute autre utilisation non médicale n'a pas été évaluée. Gecertificeerd door SGS Belgium NV, CE 1639 volgens 93/42/EEC voor anticonceptie of preventie van overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen. Elk ander niet-medisch gebruik werd niet geëvalueerd. Zertifiziert durch SGS Belgium NV gemäß 93/42/EEC, CE 1639, für die Anwendung als Verhütungsmittel oder zur Vorbeugung der Übertragung von Geschlechtskrankheiten. Andere nicht-medizinische Verwendungszwecke wurden nicht untersucht.

Durex et le logo Durex sont des marques du groupe Reckitt.
Durex en het logo van Durex zijn merken van de Reckitt groep.
Durex und das Durex-Logo sind Markenzeichen der Reckitt Gruppe.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane,
Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, UK

EG REP RB NL Brands B.V. Schiphol Blvd 207,
1118 BH Schiphol, NL

