

PRIMESIDE

OORREINIGER



**Gebruikers
handleiding**

**User
manual**

**Manuel
d'instructions**

Incl. opbergdoosje & 16 opzetstukjes

PS.
PRIMESIDE

Waarschuwing, lees nauwkeurig!

1. Gebruik het product NIET bij personen met oorbuizen, pijn, gehoorverlies, druk, ongemak of bloeding.
2. Kinderen onder de 12 jaar mogen dit product NIET zelf gebruiken.
3. Prik of duw het product NIET te diep in uw oor. Oorsmeer ontstaat bij de 'buitenste gehoorgang'.

Warning, read properly!

1. DO NOT use the product on individuals with ear tubes, pain, hearing loss, discomfort, pressure or bleeding.
2. Children under the age of 12 should NOT use the product themselves.
3. DO NOT poke or push the product too deeply into your ear. Ear wax is produced near the entrance of the ear canal, known as the "outer ear canal".

Avertissement, à lire attentivement!

1. Ne pas s'en servir si l'on a des tubes d'oreilles, ou si l'on a mal aux oreilles, une perte d'ouïe, une pression, un saignement
2. Ne pas s'en servir si l'on n'a pas au moins 12 ans.
3. Ne pas introduire le produit trop profondément dans l'oreille. Le cérumen se développe dans le conduit auditif externe.

Hoe te gebruiken?

How to use?

Comment s'en servir?



1. Klik het opzetstukje stevig op de hendel.
1. Attach the tip firmly onto the handle.
1. Cliquez le socle sur le levier.



2. Draai de Oorreiniger in de richting van de pijl om het oorsmeer te verwijderen.
2. Twist the Ear Cleaner into the direction of the arrow to remove ear wax.
2. Tournez le nettoyant auriculaire dans la direction de la flèche pour enlever le cérumen.

PS.
PRIMESIDE



3. Verwijder het opzetstukje.
3. Remove the tip.
3. Enlevez le socle.



4. Spoel de opzetstukjes af om ze vaker te gebruiken en het milieu te besparen.
4. Rinse the tip to use them more often and save the environment.
4. Rincez les socles afin de s'en servir plusieurs fois et de protéger l'environnement.



5. Bewaar de Oorreiniger in het meegeleverde opbergdoosje.
5. Store the product in the attached storage box.
5. Conservez le cérumen dans la boîte fournie.

PS.
PRIMESIDE