



**DE  
SOA  
TESTER**

🏠 De SOA Tester, Herengracht 178, 1016BR Amsterdam

✉ info@de-soa-tester.nl

📞 +31 (0) 6 - 53 66 35 87

## Gebruiksaanwijzing voor SOA-swabtest vrouw.

Lees onderstaande stappen aandachtig door voordat u aan de afname begint.

Stap 1:



Controleer de inhoud van het afnamepakket door middel van het orderformulier.

Stap 2:



Voer de afname van uw soa-test in de ochtend uit. Stap 2 tot en met stap 10 zijn instructies, die u tijdens uw afname zullen begeleiden.

Stap 3:



Open de verpakking met het wattenstaafje en het afnamebuisje.

Stap 4:



Pak het staafje aan de bovenzijde vast.

Stap 5:



Druk het wattenstaafje tot de heft naar binnen in de vagina.

Stap 6:



Draai het wattenstaafje 10 seconden langs de vaginawand.

Stap 7:



Verwijder het staafje uit de vagina en draai het dopje linksom van het buisje.

Stap 8:




Zet het wattenstaafje tot op de bodem in het buisje.

Stap 9:



Breek het staafje af aan de gekleurde breuklijn door het stokje naar u toe te buigen.

Stap 10:

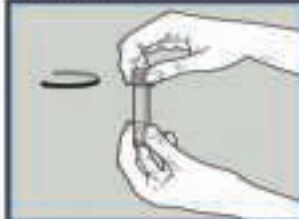

Draai de dop rechtsonter terug op het buisje en was uw handen.  
Uw afname is nu klaar voor verzending.

Stap 11:




Schrijf de afnamedatum van uw test op sticker 1 en sticker 2 van het orderformulier.

Stap 12:



Plaats sticker 1 op het afnamebuisje en sticker 2 op het laboratoriumformulier.

Stap 13:

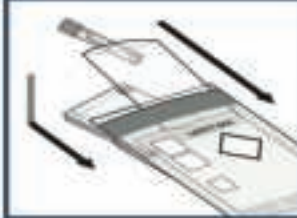

Stop het buisje en velletje in het plastic zakje. Stop het opgevouwen laboratoriumformulier in de buidel aan de buitenkant van het zakje.

Stap 14:



Plak het zakje dicht door de plakstrip te verwijderen. Vouw vervolgens het gevulde zakje en leg in het doosje. Plak tot slot sticker 3 over het sluitlipje.

Stap 15:



Stop het doosje in een brievenbus van PostNL of lever het doosje in bij een PostNL inleverpunt. Een postzegel is niet nodig.

**Dank voor uw bestelling, na het opsturen ontvangt u binnen twee werkdagen uw uitslag per mail.**

Post NL:

Verzend het doosje op werkdagen voor 17:00 en tussen de 2 en 30 graden celsius.

Indien u het doosje op zondag verzendt, zorg er dan voor dat de brievenbus een medisch postlogo bevat.

De locatie van deze medische brievenbussen vindt u op de PostNL website.