

## GBRUIKSAANWIJZING VROEGE MIDSTREAM ZWANGERSCHAPSTEST

De vroege zwangerschapstest van [thuiستنكopen.nl](http://thuiستنكopen.nl) is eenvoudig thuis uit te voeren. De test is al 4 dagen voor de verwachte menstruatie uit te voeren. Een zwangerschapstest detecteert het humaan choriongonadotrofine (hCG) in je urine dat al in een zeer vroeg stadium van je zwangerschap aanwezig is.

Bij een vroege zwangerschap neemt het zwangerschapshormoon in de eerste dagen snel toe. Wanneer u test op de dag van de uitgebleven menstruatie, dan kunt u op elk gewenst moment van de dag de test uitvoeren. Test u eerder, dan raden wij aan om ochtendurine te gebruiken omdat de concentratie hCG dan hoger is. Vermijd het teveel drinken, voordat u start met testen.

De resultaten van deze test zijn zeer betrouwbaar (>99%) en gemakkelijk af te lezen van het controlevenster. Lees voor gebruik aandachtig de testprocedure door!


### Testprocedure

1. Haal de test uit de verpakking.
2. Verwijder de plastic dop van de midstreamzwangerschapstest zodat de absorberende strip zichtbaar wordt.
3. Urineer tenminste 5 seconden over de absorberende strip, zodat deze goed doordrenkt is. Let op: urineer niet over het weergavescherm. Eventueel kunt u ook, wanneer u dat prettiger vindt, wat urine opvangen in een schoon bakje. Hier kunt u de absorberende strip voor 10 seconden in houden zodat de strip voldoende urine bevat.
4. Plaats de dop meteen over de absorberende strip, zodra u klaar bent met het opvangen van de urine.
5. Leg de test op een vlakke ondergrond met het testvenster naar boven.
6. U ziet nu dat er in het testvenster 1 of 2 lijnen tevoorschijn komen. Lees tussen de 2 en 5 minuten het testresultaat af. Let op: wacht niet langer met beoordelen van de testresultaten dan 10 minuten. Deze uitslag kan namelijk ongeldig zijn.

URINEER OVER DE ABSORBERENDE STRIP



### Resultaat

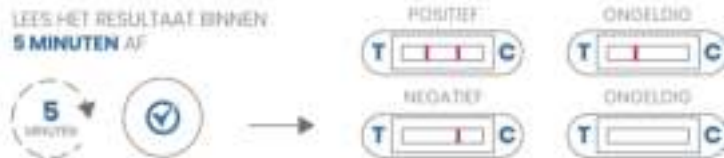

**Positief (zwanger):** Er verschijnt één roze lijn in het testvenster (T) en één in het controlevenster (C). De kleur van beide lijnen kan variëren. Dit komt omdat de concentratie van het hCG-hormoon in verschillende stadia van de zwangerschap anders zijn.

**Negatief (niet zwanger):** Er verschijnt één roze lijn in het controlevenster (C). Er verschijnt geen lijn in het testvenster.

**Ongeldig:** Er verschijnt geen lijn in het controle(C)venster. Herhaal de test met een nieuwe test. Het kan zijn dat er niet genoeg urine is geabsorbeerd. Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met [Thuiستنكopen.nl](http://Thuiستنكopen.nl).

## Verpakkingsinhoud

1. De midstreamzwangerschapstest
2. Droogmiddel
3. Bijsluiter

## Benodigheden

1. Klok of timer
2. Schoon bakje (wanneer u de urine eerst wilt opvangen)

## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze bijsluiter goed door voordat u begint met testen.
2. Alleen voor in-vitro gebruik
3. Alleen voor extern gebruik, niet doorslikken
4. Gebruik deze test niet na de houdbaarheidsdatum.
5. Open het foliezakje pas wanneer u klaar bent om te testen. Gebruik de test niet wanneer u ziet dat het foliezakje is beschadigd of al open is.
6. Deze test is niet geschikt voor hergebruik. Na gebruik kan de test bij het afval.
7. Raak de absorberende strip van de test niet aan. Houd de test vast bij de duimgreep.
8. Houd deze test buiten het bereik van kinderen.

## Bewaren

De thuisstestenkopen.nl midstreamtest moet worden bewaard in het ongeopende foliezakje bij een kamertemperatuur tussen de 2 en 30 °C. Vries de test niet in.

## Beperkingen

1. Vermijd veel drinken voordat u de test uitvoert.
2. Heeft u negatief resultaat, maar vermoedt u toch zwanger te zijn, neem dan contact op met een arts.
3. Vruchtbaarheidsmedicijnen met hCG kunnen misleidende resultaten geven.
4. Buitenbaarmoederlijke zwangenschap, cysten op de eierstokken en menopauze kunnen een vals positieve uitslag geven.
5. Wanneer je de test binnen 8 weken na een bevalling of miskraam uitvoert bestaat er een kans op een vals positieve uitslag. U dient in dit geval een arts te raadplegen voor het interpreteren van het resultaat.
6. Alcohol kan een verstorende werking hebben op het resultaat van de test. Vermijd daarom het drinken van alcohol voordat u de test uitvoert.

## Prestatiekenmerken

25mIU/ml = vroege zwangerschapstest

## Betekenis symbolen

							
Gebruiksvolgens de instructies	Gebruiksvolgens de instructies	Gebruiksvolgens de instructies	Gebruiksvolgens de instructies	Gebruiksvolgens de instructies	Gebruiksvolgens de instructies	Gebruiksvolgens de instructies	Gebruiksvolgens de instructies



THUISTESTENKOPEN.nl