

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels
PACKAGE INSERT

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door en bewaar hem voor latere raadpleging.

BESCHRIJVING:

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels is een steriele oplossing die polyethyleenglycol 400, propyleenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, boorzuur, kaliumchloride en natriumchloride bevat. Het bevat ook POLYQUAD® (polidroniumchloride) conserveermiddel in een concentratie van 0,001%.

GEBRUIK (Indicaties):

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels wordt gebruikt voor de behandeling van droge ogen. Het zorgt voor tijdelijke verlichting van branden en irritatie veroorzaakt door droogheid van het oog. **SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels** mag gebruikt worden om daily wear, extended wear en wegwerp silicone hydrogellenzen en zachte (hydrofiele) contactlenzen te hydrateren en te bevochtigen. **SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels** bevochtigt uw contactlenzen, vermindert het ongemak dat gepaard gaat met het dragen van contactlenzen en helpt deeltjes die irritatie en/of ongemak kunnen veroorzaken, te verwijderen.

CONTRAINDICATIES (Redenen om het product niet te gebruiken):

Personen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen van **SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels** zouden dit product niet mogen gebruiken.


HOE TE GEBRUIKEN:

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels mag, naar behoefte, de hele dag door worden gebruikt voor de behandeling van droge ogen. Breng de druppels in het oog en knipper. Wanneer tijdens het dragen van contactlenzen een lichte vorm van irritatie, ongemak of wazig zien optreedt, breng dan 1 of 2 druppels in het oog en knipper 2 of 3 keer. Het kan ook worden gebruikt vóór het inzetten van de contactlenzen en na het uitnemen ervan. Goed schudden vóór gebruik.

WAARSCHUWINGEN:

Het is van groot belang de aanwijzingen van uw oogzorgprofessional en alle op de bijsluiter en verpakking vermelde instructies op te volgen voor een juist gebruik van het product. Heeft u last van aanhoudend ongemak in de ogen, overmatige traanproductie, wijzigingen in het gezichtsvermogen of rode ogen? Raadpleeg dan uw oogzorgprofessional omdat het probleem ernstiger zou kunnen worden. Gezien het risico op oogirritatie mag u uw lenzen niet bewaren in of desinfecteren met **SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels**.

VOORZORGEN:

- Zorg ervoor dat de tip van de fles nooit ergens mee in aanraking komt, om verontreiniging te voorkomen.
- Draai de dop er na gebruik weer op.
- Bewaren bij kamertemperatuur.
- Houd de fles goed gesloten wanneer u hem niet gebruikt.
- Gebruiken vóór de op het product vermelde vervaldatum. 
- Gooi overgebleven vloeistof 6 maanden na eerste opening weg.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

VERPAKKING:

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels, gesteriliseerd door een combinatie van stoom en filtratie, is verkrijgbaar in plastic flessen van 10 ml.



DISTRIBUTEUR

Alcon NV

Medialaan 36

1800 Vilvoorde, België




Alcon Laboratories, Inc.

6201 South Freeway

SYSTANE® ULTRA

Updated: November, 2012

Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

 Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.

Frimley Business Park

Frimley, Camberley

Surrey, GU167SR,

Verenigd Koninkrijk



© 2012 Novartis