

⚠ Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig hebt gelezen, voordat u het product gebruikt.

## INBEGREPEN MATERIALEN EN VEREISTE NIET INBEGREPEN MATERIALEN

**1** Testcassette (de testcassette dient tot gebruik in de verzegelde verpakking te worden gelaten)

**2** Verpakking, tegelijkertijd ook het werkstation

**3** Klok, timer of stopwatch (niet inbegrepen)

**4** Steriel wattenstaafje

**5** Buisje met ca. 0,3 ml vloeistof

**6** Druppeldopje

## TESTPROCEDURE

**1** Was of ontsmet uw handen voordat u de test uitvoert.

**2** Snuit uw neus. Houd 1,5 meter afstand van omstanders bij het snuiten van uw neus.

**3** Steek de buis in het werkstation. ⚠ Zorg ervoor dat de onderkant van het buisje de onderkant van de verpakking raakt.

**4** Open de verpakking van het wattenstaafje waar aangegeven. Trek het wattenstaafje uit de verpakking door het plastic uiteinde vast te pakken. Raak de tip van het absorberende wattenstaafje niet aan.

**5** Steek de absorberende punt van het wattenstaafje voorzichtig in uw linkerneusgat. Zorg ervoor dat de volledige punt van het wattenstaafje in uw neusgat zit (2-4 cm diep). Breng het wattenstaafje niet verder in zodra u weerstand voelt.

**6** Draai het wattenstaafje minstens 5 keer tegen de binnenkant van uw neusgat. Zorg voor goed contact tussen het wattenstaafje en de binnenkant van uw neusgat.

**7** Verwijder het wattenstaafje en breng het in uw rechter neusgat. Herhaal stap 5 en 6.

**8** Verwijder het wattenstaafje uit uw neusgat en steek het wattenstaafje in de buis in het werkstation.

**9** Meng het monster goed met de buffervloeistof door het wattenstaafje minstens 6 keer rond te draaien terwijl u de punt van het wattenstaafje tegen de onderkant en zijanten van de buis drukt.

**10** Start de timer. Laat het wattenstaafje 1 minuut in de buis zitten.

**11** Til het wattenstaafje iets op uit de buffervloeistof en knijp meerdere keren van buitenaf in de buis. Probeer zoveel mogelijk oplossing uit het wattenstaafje te knijpen.

**12** Verwijder het wattenstaafje en gooi het weg in een plastic zak.

**13** Duw de in de set meegeleverde druppeldop op de buis en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.

**14** Haal het testapparaat uit het zakje en leg het op een vlakke, schone ondergrond.

**15** Voeg 4 druppels van de oplossing toe aan de monsteropening (S) van het testinstrument door voorzichtig in het buisje te knijpen.

**16** Start de timer en wacht 15 minuten. Het is belangrijk om de resultaten na 15 minuten af te lezen.

**17** Lees uw resultaten (zie de sectie *Interpretatie van de resultaten*).

INSTRUCTIEVIDEO EN INFORMATIE:  
**CORONA-ZELFTEST.NL**



