

Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat je handen en het gebied rond de opening van je oren schoon en droog zijn. Rol de oordop tussen je handen totdat deze warm, rond en soepel is.

Plaats het siliconen oordopje zachtjes tegen de gehoorgang en vorm/duw deze zachtjes zodat deze het oor goed afsluit. Als de oordop te groot is, kun je er een klein gedeelte van afhalen.

Verwijder de oordop door deze achter het oor naar voren te drukken en vervolgens de oorlel naar beneden te trekken. Herhaal dit totdat de oordop loskomt en verwijder deze vervolgens voorzichtig.

De oordoppen kunnen opnieuw gebruikt worden door deze wederom tot een bal te rollen en de stappen hierboven te herhalen. Gooi de oordoppen weg als ze vies zijn of niet langer hechten.

WAARSCHUWING



Bedek alleen de opening van het oor en duw het oordopje niet in de gehoorgang.

CE 2834

EN 352-2:
2002 (EU) 2016/425.

Richtlijnen en specificaties

- Plaats de oordoppen niet in de gehoorgang.
- Controleer de oordoppen regelmatig op beschadigingen. Gooi ze in de afvalbak en vervang ze voor nieuwe.
- Bewaar de oordoppen in de oordopdoos.
- Houd de oordoppen uit de buurt van water, vuil en niet giftig, maar kunnen irritant zijn.
- Probeer stukjes van de oordoppen niet in de gehoorgang achterblijven. Indien nodig, verwijder ze maar consulteer een arts.
- Gebruik de oordoppen niet tijdens het zwemmen in diepten van meer dan 1 meter.

Approved Body: CCGS Certification
Address: Block 1, Blanchardstown
Blanchardstown, Dublin15, D15
Test Laboratory: Michael & Associates
Address: 2766W.College Ave S
Testing date: 4/29/19-5/17/19
UKCA Declaration of Conformity