



In verband met de hygiëne kunnen wij medische en Lichaam artikel niet retour nemen.

### **Hoe te gebruiken?**

**Stap 1:** Was uw handen. Doe rond de 3 gram neuszout in de fles.

**Stap 2:** Vul een schone fles met warm gedestilleerd water of eerder gekookt water tot aan de vullijn (250ml).

**Stap 3:** Draai de dop en de buis vast. Schud de fles voorzichtig om het mengsel op te lossen.

**Stap 4:** Ga voor een gootsteen staan, buig voorover naar uw comfortniveau en kijk naar beneden, ondersteboven de fles en steek het mondstuk voorzichtig in één neusgat. Druk op de knop, de oplossing begint te stromen in het ene neusgat en komt er aan de andere neuskant weer uit. Laat de knop los om de oplossing te stoppen.

**Stap 5:** Blaas zachtjes uw neus, zonder uw neus volledig te knijpen, omdat dit druk zal uitoefenen op de trommelvliezen.

**Stap 6:** Herhaal vervolgens stap 4 en 5 voor uw andere neusgat.

### **Voorwaarden:**

In geval bij fabrieks- garantie of DOA verzoeken wij u contact op te nemen met de Extensso Servicedesk +31 (0) 6 275 4 66 69 (ook voor Whatsapp) of Email adres: [info@extensso.nl](mailto:info@extensso.nl)