



# Gebruiksaanwijzing HeltiQ Wratweg

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik -

- Alleen gebruiken voor de behandeling van hand- en voetwratten en waterwrattjes -



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Het product uitsluitend gebruiken zoals voorgeschreven. Het niet juist opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan resulteren in huidbeschadiging zoals bevriezingsverschijnselen.



Niet gebruiken wanneer de verpakking of het spuitbusje beschadigd is.

## INHOUD HELTIQ WRATWEG

- 38 ml spuitbusje met kap; bevat Dimethylether (DME)
- gebruiksaanwijzing

## PRODUCTOMSCHRIJVING

HeltiQ Wratweg is een product voor het behandelen van hand- en voetwratten en waterwrattjes (Mollescum Contagiosum) door middel van bevriazing (cryotherapie).

## HET HERKENNEN VAN HAND- EN VOETWRATTEN

Wratten zijn onschuldige verdikkingen van de huid veroorzaakt door het "human papilloma virus" (HPV). Wratten komen met name voor op de bovenkant van de handen, langs de nagels, op ellebogen en knieën.

### Wratten zijn

- Meestal hard en ruw en hebben een "bloemkoolachtig" oppervlak z
- Meestal niet pijnlijk

Voetwratten komen voor op de bal van de voet, op de onderkant van de hiel en tenen.

Voetwratten hebben vaak een harde buitenrand en soms een zwart puntje in het midden. Door de druk van staan en lopen worden de wratten in de voetzool gedrukt waardoor voetwratten platter zijn.

### Voetwratten zijn

- Meestal pijnlijk, met name wanneer ze voor komen op de bal van de voet of op de onderkant van de hiel
- Rond en kunnen plat zijn door de druk van staan en lopen

## HET HERKENNEN VAN WATERWRATTJES

Waterwrattjes zijn parelachtige, roze, ronde wratten die lijken op een hoed. Ze zijn erg besmettelijk en worden veroorzaakt door een pokkenvirus. Waterwrattjes komen in groepen voor, meestal op de romp, armen en benen. De grootte van het waterwrattje varieert van 1 mm tot 8 mm.

Ben je er niet zeker van of je met een wrat te maken hebt, raadpleeg dan een arts.

## BEOOGD GEBRUIK

Het product is ontwikkeld om hand- en voetwratten en waterwrattjes (Mollescum Contagiosum) te behandelen bij personen van 4 jaar en ouder. Het product is zonder recept verkrijgbaar.

## CONTRA-INDICATIES

HeltiQ Wratweg mag niet worden gebruikt:

- Als er sprake is of is geweest van een bevestigde diagnose van kanker en/of behandeling wordt ondergaan tegen kanker
- Ter behandeling van genitale wratten
- Op een donkere of licht gepigmenteerde huid
- Op moedervlekken, schoonheidsvlekken, donkere- al dan niet behaarde vlekken
- Wanneer de huid geïrriteerd of ontstoken is of bij eczeem
- In het gezicht
- Op een gevoelige huid zoals; nek, hals, billen of onder de oksels en borsten
- Op vreemd uitziende huidaandoeningen of wanneer niet duidelijk is of het om een wrat gaat
- Als er sprake is van gevoeligheid of allergie tegen extreme kou (urticaria)
- Bij personen met diabetes of stoornissen in de bloedsomloop o.a. ziekte van Raynaud
- Bij personen die immunosuppressiva slikken of bij personen met een auto-immuun ziekte
- Bij Hiv-geïnfecteerde personen
- Bij personen die antistollingsmiddelen slikken en hemofiliepatiënten
- Bij kinderen onder de 4 jaar
- In combinatie met andere wratbehandelingen

## WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

- Zeer licht ontvlambaar spuitbusje. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik
- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Spuitnevel niet inademen
- Vermijd contact met de ogen. Spray niet in of richting het oog, dit kan leiden tot bevriazing en/of blindheid
- De wrat niet meer dan 4 keer behandelen met steeds 2 weken tussen de behandelingen
- Raadpleeg een arts wanneer de behandeling na 4 keer geen resultaat heeft gehad
- Het product kan huidbeschadiging zoals bevriezingsverschijnselen, littekenvorming of hypo-/hyperpigmentatie veroorzaken wanneer het niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt
- Wanneer je het product wilt gebruiken tijdens de zwangerschap of in de periode dat je borstvoeding geeft, raadpleeg dan vooraf een arts



# Gebruiksaanwijzing HeltiQ Wratweg


- Uitsluitend voor uitwendig gebruik -

- Alleen gebruiken voor de behandeling van hand- en voetwratten en waterwrattjes -

## GEBRUIKSAANWIJZING HAND- EN VOETWRATTEN

Let op! De plastic kap niet van het spuitbusje verwijderen!

Grootte van de wrat	Aantal keren activeren van de spuitbus
Kleine wrat < 3 mm	3x
Middelgrote wrat 3 mm tot 5 mm	4x
Grote wrat > 6 mm	5x

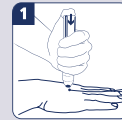

1 Positioneer de wrat naar boven zodat de opening van de kap over de wrat geplaatst kan worden. Plaats de opening van de kap zodanig dat de rand van de kap goed aansluit op de huid.



Voor de meest effectieve behandeling het spuitbusje zo verticaal mogelijk houden.



2 Houd de kap goed vast en activeer het spuitbusje door deze met de duim 3 tot 5x kort na elkaar stevig in te drukken (zie tabel)

Houd de kap vervolgens minimaal 10 seconden onsloten over de wrat. Haal het spuitbusje van de wrat.

Er kan een 2 mm witte cirkel rondom de wrat ontstaan. Wanneer de huid droog is, kan er een klein litteken ontstaan. Dit verdwijnt in de komende dagen/weeken.

Let op! Wanneer er sprake is van een aantal dicht bij elkaar liggende wratten, behandel dan elke wrat afzonderlijk met een interval van 14 dagen tussen de behandelingen.

Let op! In de meeste gevallen is slechts één behandeling nodig. Bij hardnekkige wratten kun je de behandeling herhalen na 10 seconden.

Wanneer de wrat na 14 dagen niet verdwenen is, kun je de behandeling herhalen zoals voorgeschreven.

Tijdens of direct na de behandeling kan er een licht pijnlijk of prikkelend gevoel ontstaan dat geleidelijk weer verdwijnt.

## GEBRUIKSAANWIJZING WATERWRATTJES

Let op! De plastic kap niet van het spuitbusje verwijderen!



1 Positioneer de waterwart naar boven zodat de opening van de kap over de waterwart geplaatst kan worden. Plaats de opening van de kap zodanig dat de rand van de kap goed aansluit op de huid.

Voor de meest effectieve behandeling het spuitbusje zo verticaal mogelijk houden.



2 Houd de kap goed vast en activeer het spuitbusje door deze met de duim 3x kort na elkaar stevig in te drukken (zie afbeelding).

Houd de kap vervolgens nog minimaal 5 seconden onsloten over de waterwart. Haal het spuitbusje van de waterwart.

Er kan een 2 mm witte cirkel rondom de waterwart ontstaan. Wanneer de huid droog is, kan er een klein litteken ontstaan. Dit verdwijnt in de komende dagen/weeken.

Let op! Wanneer er sprake is van een aantal dicht bij elkaar liggende waterwratten wordt aangeraden iedere waterwart afzonderlijk te behandelen. Laat 1 minuut tussen de behandelingen om de plastic kap weer op kamertemperatuur te laten komen. Behandel niet meer dan 2 waterwratten per dag.

Let op! Wanneer er sprake is van een aantal dicht bij elkaar liggende waterwratten behandel dan elke waterwart afzonderlijk met een interval van 1 dag tussen de behandelingen.

Wanneer de waterwart na 14 dagen niet verdwenen is, kun je de behandeling herhalen zoals voorgeschreven.

Tijdens of direct na de behandeling kan er een licht pijnlijk of prikkelend gevoel ontstaan dat geleidelijk weer verdwijnt.

## WAARSCHUWING!

Behandel één waterwart en wacht 24 uur zodat overgevoeligheid zichtbaar wordt. Behandel niet meer dan 2 waterwratten per dag. Behandeling wordt afgeraden voor kinderen met eczeem.

## NA DE BEHANDELING

- Er kan na de behandeling een blaar ontstaan; deze blaar niet doorprikken
- Niet aan de behandelde wrat komen of krabben
- Houd de behandelde wrat schoon om infectie te voorkomen
- Zwemmen, wassen, baden en douchen is toegestaan

## BEWAARADVIES

- Bewaren in een koele en droge ruimte op kamertemperatuur (maximaal 25 °C)
- De inhoud en de verpakking weggoien volgens de plaatselijke voorschriften

## POTENTIËLE BIJWERKINGEN

- Cryotherapie kan hypopigmentatie (lichte plekken) of hyperpigmentatie (donkere plekken) veroorzaken. Deze zullen na verloop van tijd verdwijnen
- Bloeden
- Blaarvorming
- Littekenvorming naar aanleiding van het niet juist opvolgen van deze gebruiksaanwijzing
- Tijdelijk ongemak zoals pijn of een prikkelend gevoel
- Raadpleeg bij twijfel of bij het ontstaan van een ontsteking/complicatie een arts

## KLACHTEN EN KLANTENSERVICE

Elk ernstig incident in verband met dit product moet worden gemeld aan Koninklijke Utermöhlen NV en aan de nationale autoriteiten.

Neem contact op met Koninklijke Utermöhlen NV bij vragen of problemen met het product. Koninklijke Utermöhlen NV is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)561 69 33 66.

HeltiQ Wratweg is een medisch hulpmiddel.



Geproduceerd door:

Koninklijke Utermöhlen NV, De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega  
Nederland +31 (0)561 69 33 66, www.heltiq.nl



0344